

VERZEICHNIS	
Radiofrequenz und Sitzungen	2
Gerät, Gebrauch und Turmausführungen	3
Gesichtsbehandlung, Körperbehandlung und Technischen Daten	4
Informationen Web	5


## Radiofrequenz mit **MultiEquipment** von Weelko

Schlaffe Haut? **Altern?** Falten und Ausdruckslinien? **Pigmentveränderungen?** Wasserentzug? **Trennsäcke?** **Augenringe?** Mangel an Muskeltonus im Gesicht und Dekollettee? **Orangenhaut?**

### Verjüngt dein Gesicht mit **MultiEquipment**, F-333

Radiofrequenzgerät für kosmetische Behandlungen im Gesicht geeignet. Ideal um die Haut zu straffen und der Haut Konturen zu verleihen. Das Gerät erzeugt Wärme, die die Kollagenfasern stimuliert und hilft bei der Beseitigung von Schlaffheit.

Das Gerät ist mit 2 Elektrodenhaltern und 7 Einsätzen ausgestattet.

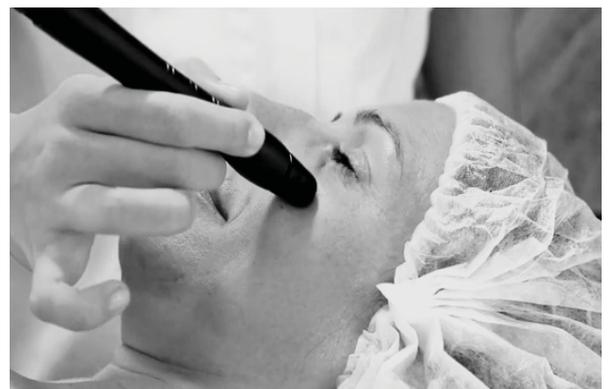

## Radiofrequenz

### Über die Radiofrequenz

Die Radiofrequenz ist eine nicht invasive kosmetische Behandlung und erzeugt einen Lifting Effekt. Es ist eine Technik zur Gesichtsverjüngung durch Erwärmung der tiefen Lederhaut. Die Radiofrequenz von Weelko wird hauptsächlich im Gesichtsbereich verwendet, kann aber auch in lokalisierte Bereiche des Körpers, wie Dekoltee, Unterleib, Oberschenkel und Gesäßmuskeln. Weelkos Radiofrequenz ist monopolar, was bedeutet dass sie tiefer wie bipolare Radiofrequenzgeräte in die Haut eindringt.

### Wie funktioniert es?

Die Radiofrequenz erzeugt Wärme im behandelten Bereich, die auf das Gewebe wirkt und die Durchblutung und die Bildung von Kollagen und Elastin fördert, die essentielle Substanzen sind, um die Haut glatt und jung zu halten. Diese Technik lässt den Körper denken, das er mit Hitze angegriffen wird. Der Körper reagiert darauf und sendet regenerierende Elemente zu dem Bereich, um das Gewebe auf natürlicher Art zu regenerieren.

### Welche Effekte hat sie?

- Sie stimuliert die Durchblutung
- Sie stimuliert die Kollagenproduktion und die Elastin
- Verbesserung der Hautelastizität
- Reduziert das Auftreten von Falten

### Wann sollte sie angewendet werden?

- Bei feinen Fältchen
- Bei Schläffheit
- Um Konturen in der Kiefer-Linie und unter dem Kinn zu definieren
- Um Falten und Linien um die Augen, Mund und Stirn zu glätten
- Um schlaffe Haut unter dem Kinn zu stärken
- Bei lokalisierter Fettleibigkeit

### Gegenanzeigen:

- Hautkrankheiten
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Schwere Herzerkrankung
- Gerinnungsstörungen
- Erkrankungen der neuromuskulären Gewebe und Bindegewebserkrankungen
- Krebs
- Patienten mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren
- Metallimplantate in den Behandlungsbereich.
- Neue Kollagenimplantate.

## Sitzungen

Eine Standardbehandlung von Radiofrequenz besteht aus 4 bis 10 Sitzungen. Die Sitzungen dauern ca. 10 Minuten im Gesicht und ca. 30 Minuten für Körperbehandlungen. Es wird empfohlen 15 Tage Abstand zwischen den Sitzungen zu lassen.

### Die Gegenanzeigen von Radiofrequenz sind:

- Rötung und Schwellung nach der Sitzung (sie sind vorübergehend, aber in der Regel vorhanden).
- Einige kleine Hautblutungen in zerbrechlichen Kapillarbereichen (selten).



### Radiofrequenz F-333:



#### Kurze Bedienungsanleitung:

- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach um die Kabel und das Zubehör passend anzuschließen.
- Tragen Sie Gel auf dem Behandlungsbereich auf.
- Schalten Sie das Gerät mit der POWER Taste ein.
- Drücken Sie auf SELECT um den gewünschten Elektrodenhalter auszuwählen (Gesicht oder Körper).
- Setzen Sie die Körperplatte in Kontakt mit einer großen Hautfläche. Diese sollte in der Nähe der Behandlungszone sein, sowohl bei Gesichts- als auch bei Körperbehandlung.
- Wählen Sie die gewünschte Elektrode entsprechend der Behandlung aus. Je nach Behandlungszone muss eine Elektrode in der richtigen Größe ausgewählt werden.
- Drücken Sie START/PAUSE um die Behandlung zu beginnen.
- Wählen Sie den Wellenzustand je nach Kundenbedarf aus. Es wird empfohlen, zuerst eine diskontinuierliche Welle (für sensible Haut) auszuwählen. Danach können andere Wellenzustände je nach Kundenbedarf/-gefühl und nach Ermessen der Kosmetikerin gewählt werden.
- Wenden Sie die Elektroden auf die Haut des Kunden mit kontinuierlichen und ununterbrochenen Kreisbewegungen an. Lassen Sie die Elektrode nicht für lange Zeit ohne Bewegung an der gleichen Stelle, der Kunde könnte Verbrennungen erleiden.

#### Säule Version:

Das Radiofrequenzgerät ist ein einzelnes Tischgerät. Jedoch kann es mit dem Trolley **MULTILAB** von Weelko oder mit dem Multifunktionssturm **K-PSULE** kombiniert werden.



**Gesichtsbehandlung**



Elektrodenhalter für das Gesicht



Keramischen Einsätze für das Gesicht

**Körperbehandlung:**



Elektrodenhalter für den Körperbereich



Keramischen Einsätze für den Körper

Setzen Sie die negative Platte in Kontakt mit einer großen Hautfläche. Diese sollte in der Nähe der Behandlungszone sein, sowohl bei Gesichts- als auch bei Körperbehandlungen.



**Technischen Daten:**

Abmessungen und Gewicht	Verpackungsabmessungen	49 x 45 x 19,5 cm
	Produktmassen (cm) W x H x D	33,5 x 9,5 x 25,5
	Brutto Gewicht (kg)	5
	Netto Gewicht (kg)	4,5
Technische Daten	Voltage	220V—240V
	Frequenz	50 Hz/60Hz
Maximale Arbeitsleistung		150 Watts
Arbeitsfrequenz		0,3 MHz (300kHz)

**Ersatzteile**

No.	PRODUKT	BEZEICHNUNG
1	Set mit 7 keramischen Einsätzen	40024
2	Elektrodenhalter für Gesicht	40019
3	Elektrodenhalter für Körper	40020



Klicken Sie auf TECHNICAL ZOOM in unserer Webseite und laden Sie alle technischen Informationen und Verkaufsmaterialien runter. Fotos, Dossiers, technische Daten, usw. Nicht verpassen!

Dossiers | Technical Zoom



Schalten Sie WEELKO TV auf weelko.com ein . Die beste Methode um unsere Geräte aus der Nähe zu betrachten. Für alle die lieber ein Bild wie tausend Worte haben!!!



[weelko.com](http://weelko.com)

Barcelona  
Pol. Ind. La Valldan  
Camí de Garreta,92  
08600 Berga  
Barcelona – Spain  
T. +34 93 824 90 20  
E. [info@weelko.com](mailto:info@weelko.com)