



weelko

# HighTech Combi Fit WKB009



Pressotherapy + Thermotherapy + Electrostimulation



# HighTech Combi Fit WKB009




Pressotherapy + Thermotherapy + Electrostimulation

## Equipo

- Botas de presoterapia derecha e izquierda.
- Pierna derecha e izquierda.
- Cintura.
- Brazos derechos e izquierdo.
- Manta, cables y tubos de aire.
- 10 electrodos grandes.
- 10 electrodos pequeños.
- 2 cables conectores con 10 salidas.
- 20 bandas elásticas con velcro.
- Unidad principal.

Nota: Los equipos vienen protegidos con un plástico adhesivo muy delgado, que protege la pantalla de posibles rayones durante el embalaje, y generalmente se marca, se puede retirar el mismo una vez desembalado.



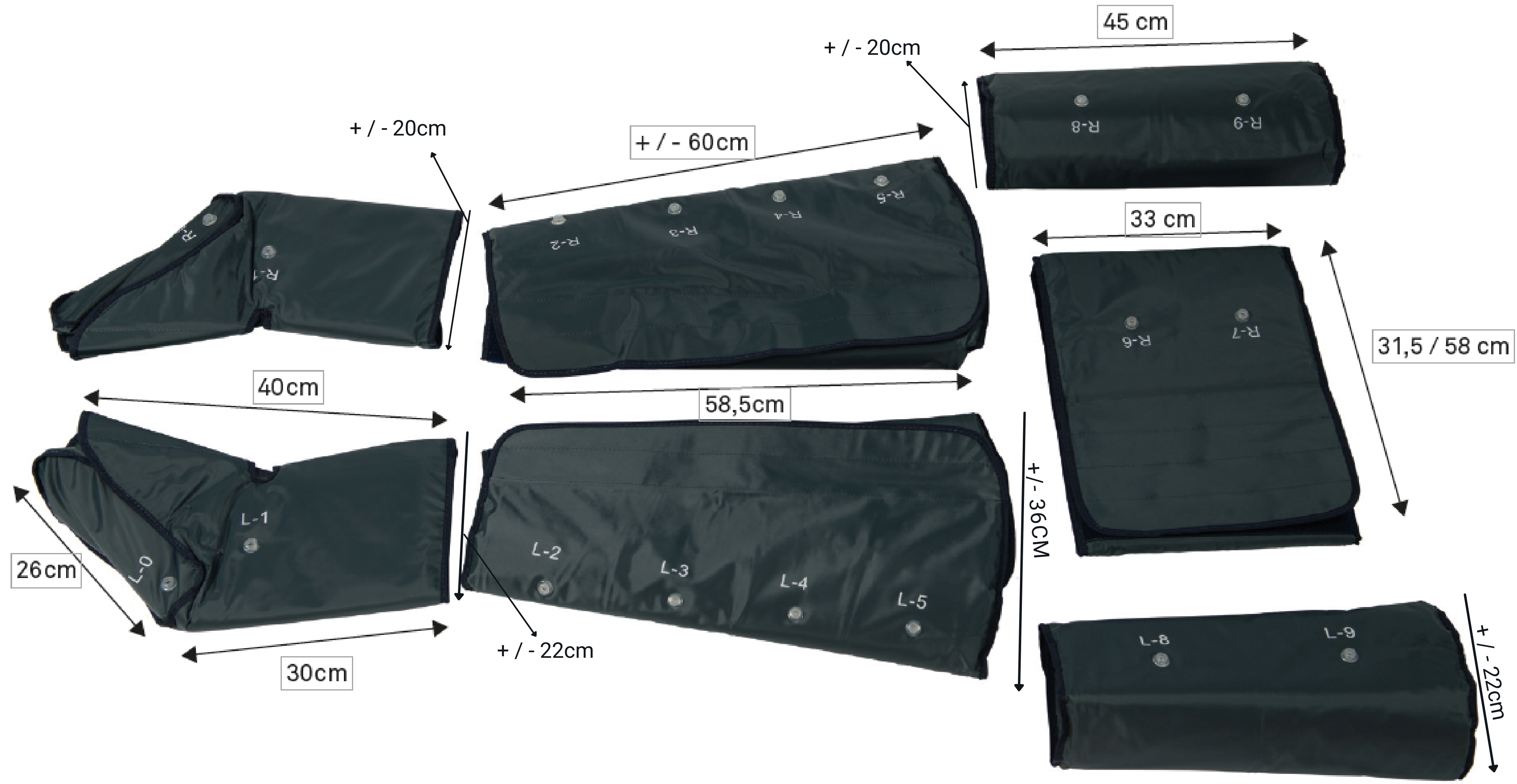

# HighTech Combi Fit WKB009



Pressotherapy + Thermotherapy + Electrostimulation

## Equipo

Nuestro WKB009, es un equipo multifuncional digital de belleza con pantalla táctil que combina 3 funciones: presoterapia, termoterapia y electroestimulación. Traje compuesto de botas, piernas, faja abdominal, brazos y manta para almacenar el traje. Viene con 20 electrodos para EMS, dos conectores y bandas elásticas para sujetarlos. Es ideal para mejorar la circulación, facilitar la eliminación de grasas mediante la activación del drenaje linfático, así como la oxigenación celular, la relajación, además del fortalecimiento muscular y reeducación motora.



# HighTech Combi Fit

## WKB009



Pressotherapy + Thermotherapy + Electrostimulation

### Equipo

Para conectar el equipo correctamente, deberá hacerse en el panel trasero, que de izquierda a derecha irá de la siguiente forma:

- Conecte el cable de alimentación o suministro de energía (200-240V 50Hz).
- Conecte correctamente los cables con los dos conectores de la electroestimulación, el primer conector para EMS 0-4 y el segundo conector para EMS 5-9.
- Conecte la termoterapia y la presoterapia.
- Coloque la manta con los cables en una superficie plana para que el cliente pueda tumbarse. Proteja la manta con un papel desechable para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.
- Envuelva las prendas alrededor del cuerpo del usuario y ajústelo. Recuerde utilizar un traje desechable debajo del traje de la presoterapia, e higienizar después de ser utilizada.

# HighTech Combi Fit WKB009



Pressotherapy + Thermotherapy + Electrostimulation



Para encender el equipo encontraremos un botón en el panel frontal, y luego hacemos clic en el logo Weelko de la pantalla para proceder a seleccionar los menús deseados. Escoja la función "EMS" para la electroestimulación, "INFRARED" para la termoterapia y "PRESSOTHERAPY" para la presoterapia.

# HighTech Combi Fit

## WKB009



### **Pressotherapy**

Es una técnica, no invasiva, ni dolorosa, coadyuvante en los tratamientos estéticos, donde se busca estimular sistema linfático y circulatorio, siendo así un excelente complemento en cabina. Su sistema de compresión está diseñado para aumentar el flujo venoso y linfático, mejorando el retorno de líquidos. Nos ayuda a promover las funciones naturales de limpieza de toxinas del cuerpo. La revitalización y oxigenación son sin duda una consecuencia del tratamiento con nuestro equipo, consiguiendo adelgazar y redefinir las piernas, la cintura y los brazos mientras mejora el tono de la piel. La cantidad de sesiones puede ser de 2 a 3 por semana, y dependerá del tipo de tratamiento y los resultados que se quieran conseguir, por eso la evaluación previa del cliente es muy importante. Este es un tratamiento seguro, relajante y placentero. Nuestro WKB009 además cuenta con termoterapia y electroestimulación (EMS), que resulta una excelente combinación.



# HighTech Combi Fit WKB009



Para comenzar debemos seleccionar el tipo de tratamiento a realizar:

**Pressotherapy:** activa la presoterapia.

**Mode:** en la función de presoterapia, el menú "MODE" permite escoger uno de los cuatro programas A, B, C, D.


**Level:** se regula la intensidad de la presión del tratamiento, dosificada en tres niveles, bajo, medio, alto. Siempre se trabajará a tolerancia del cliente, comenzando de menos a más para evitar daños, y comprobando que la intensidad a lo largo del tratamiento es la adecuada.

**Time:** nos determina el tiempo de tratamiento, 30-45min. máx. recomendado.

**Play y Pause:** para comenzar a emitir o pausar el equipo cuando lo necesitemos.

**Infrared:** activa la termoterapia.

**Intensidad:** se puede regular la intensidad del calor en cada zona del traje en la pantalla táctil.

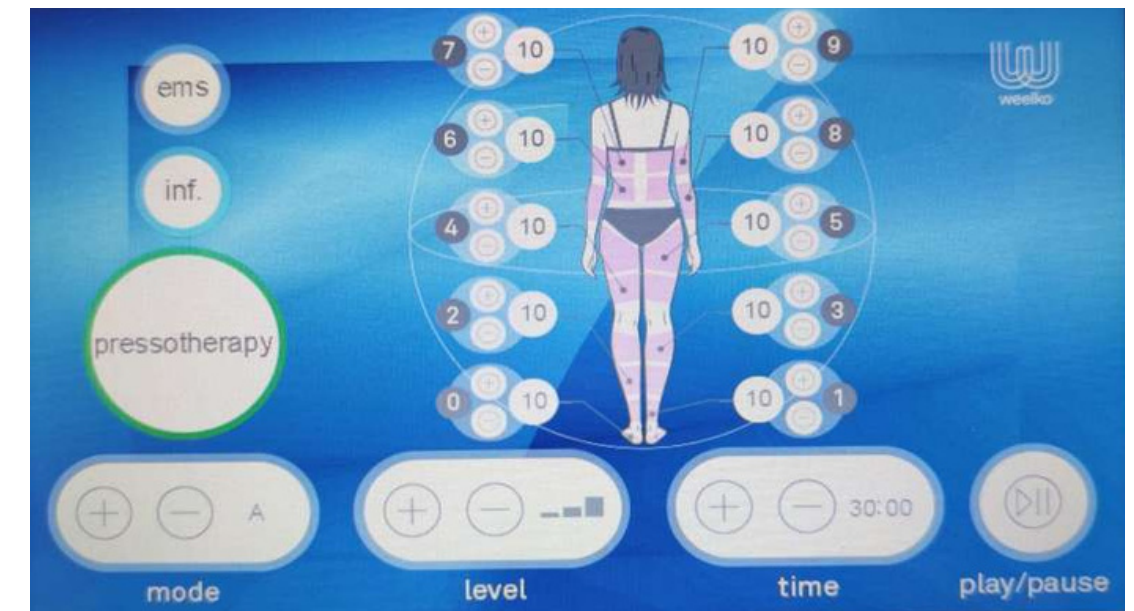


# HighTech Combi Fit WKB009



Contiene 4 programas:

Modo A, este programa infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 1 y desinfla la 1 cuando se infla la 2, así sucesivamente de una extremidad a otra, subiendo de los pies a los brazos de manera progresiva, con un tiempo de llenado por zona de 11seg. y de reposo de 11seg., esto proporciona una agradable sensación de drenaje suave. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa.

Modo B, este programa infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 2 y desinfla la 1 cuando se infla la 3, y así va subiendo progresivamente de un lado al otro, con un tiempo de llenado de 11seg, luego aumenta la presión en todo el cuerpo. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa. La sensación de presión es un poco más intensa y profunda, utilizado generalmente para tratamientos de celulitis edematosa, grasa o retención de líquidos, edemas.

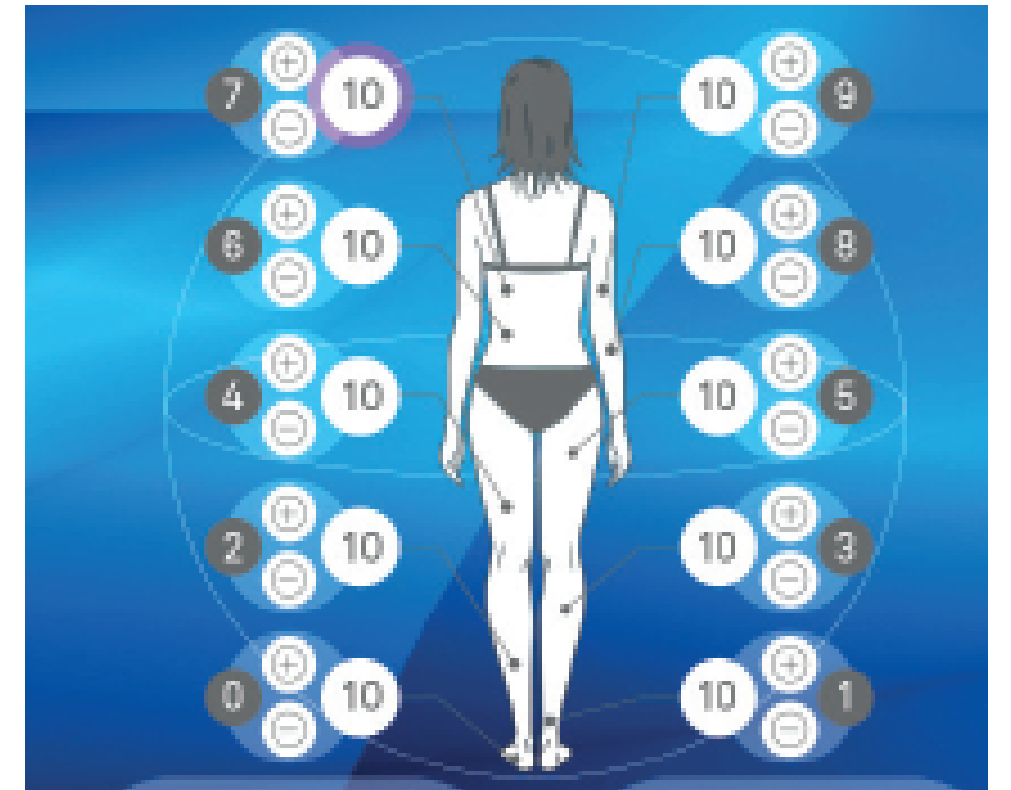

# HighTech Combi Fit


## WKB009



Modo C, este tipo de programa infla de la zona 0 a la 9. Empieza a inflar por la zona 0 y añade la zona 1, seguido de la 2 y así sucesivamente va añadiendo zonas al proceso de inflado, la presión de aire no se va perdiendo de forma simultánea como en los modos anteriores, luego hay un tiempo de reposo de 11seg. y al final, repite el programa. Ejerce una presión mucho más intensa, concentrada en abdomen y muslos. Se recomienda para clientes con celulitis o grasa localizada más densa en muslos y abdomen.

Modo D, El programa D infla las tres zonas a la vez: piernas, abdomen y brazos desde la extremidad hasta la parte superior. Es un modo mucho más intenso, concentrado en abdomen y brazos. Recomendado para la pesadez abdominal y retención de líquido a nivel de brazos.

Se puede trabajar zonas independientes sin utilizar ningún programa, el equipo permite escoger cada parte del traje y regular el tiempo de llenado de aire de la zona a tratar independientemente. Solamente debe pulsar el botón de la zona y regular la intensidad por medio de las teclas “+” y “-” de 0 al 15.


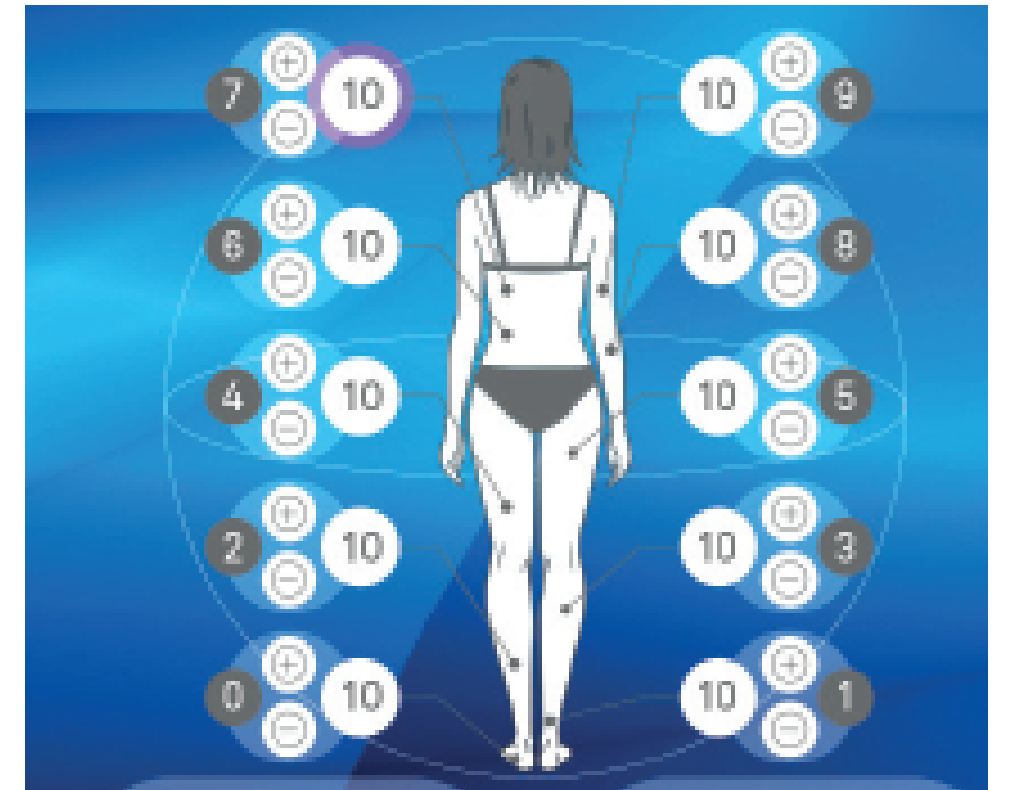


# HighTech Combi Fit WKB009



## Modo de aplicación

- Conectar correctamente en el panel trasero, es importante seguir las indicaciones numéricas. Los cables son para la función EMS (conector para EMS 0-4 y del 5-9) y termoterapia.
- Es importante colocar la manta con los cables en una superficie plana para que el cliente pueda tumbarse.
- Proteja la manta con un papel desechable para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.
- Envuelva y ajuste las prendas alrededor del cuerpo del usuario. Recuerde utilizar un traje desechable debajo del traje de la presoterapia.
- Encendemos el equipo, y seleccionamos el tratamiento a realizar, presoterapia o termoterapia, y su intensidad.
- La presión del equipo es de 20-40KPa, 25-40L/m.

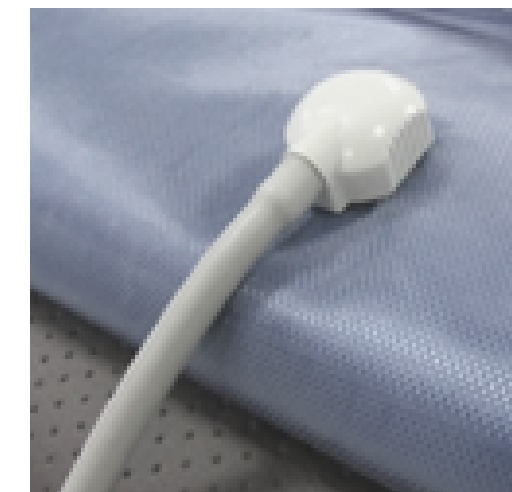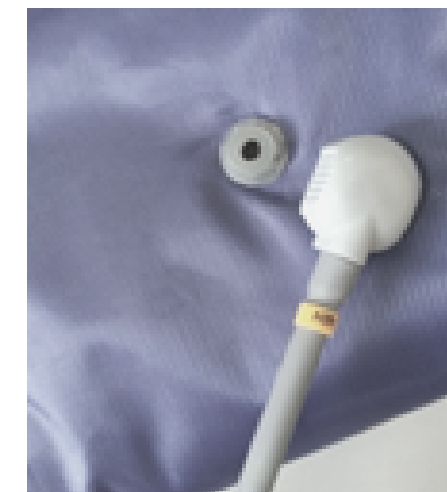

# HighTech Combi Fit WKB009




## Modo de tratamiento

La aplicación de presión de aire, que estimula el retorno venoso de sangre al corazón, da como resultado aumento de la circulación sanguínea y linfática, además de tener un efecto relajante, y térmico que produce el equipo.

El cliente deberá estar decúbito supino tendido en la camilla y procederemos a colocarle los diversos dispositivos y cubrir las zonas, ya sean pies, piernas, cintura o brazos. Esto según el protocolo seleccionado, distribuirá la presión de aire controlada de forma ascendente en las partes del cuerpo a tratar.

Mantenga la comunicación con el cliente durante el tratamiento, para ajustar la temperatura, la presión y el tiempo.

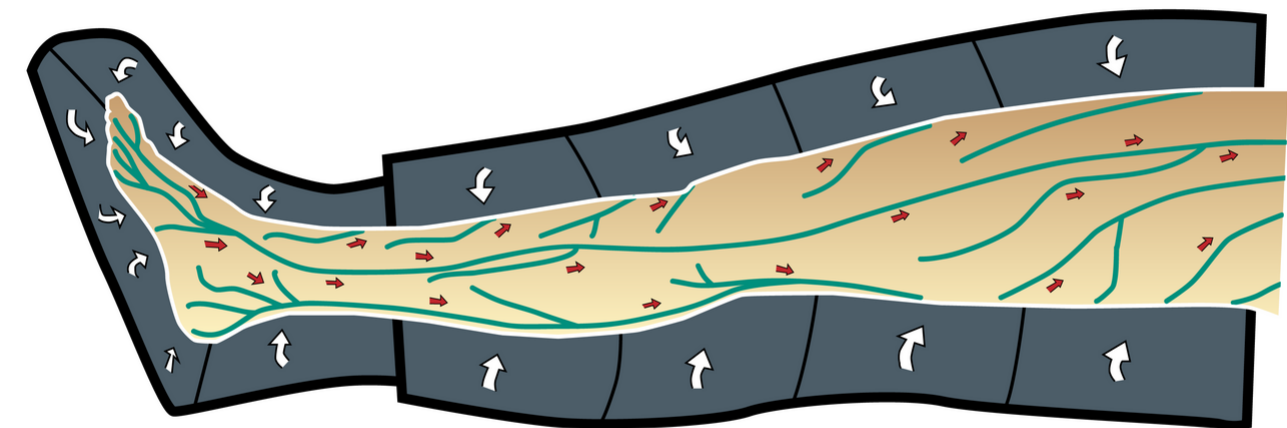

# HighTech Combi Fit WKB009



## La termoterapia

Este equipo nos permite además tener la función de termoterapia, que no es más que el tratamiento corporal mediante el uso de calor. Este se utiliza para activar la circulación general, acelerar el metabolismo de las grasas, producir alivio de dolores musculares, y relajación. La temperatura corporal irá aumentando a consecuencia de una mayor temperatura generada por el equipo (temperatura máxima del equipo es de 55 °C), y con ella se logra aplicar un efecto terapéutico y relajante. A medida que el cuerpo se calienta, además de sudar, se produce un aumento de la velocidad a la que circula la sangre, y de esta manera se acelera el metabolismo, mientras que el cuerpo intenta enfriarse. Cuenta con 5 zonas de tratamiento que permiten regular la temperatura de forma independiente que se puede graduar de 0 a 62.

# HighTech Combi Fit WKB009



## EMS


**Mode:** en la función de EMS, el menú “MODE” permite escoger la frecuencia de trabajo con electroestimulación con cuatro programas A, B, C, D.

**Intensidad:** se regula directamente en el número correspondiente a cada electrodo y va del 1 al 15. En el caso de los programas C y D la intensidad debe ser suficiente para la actividad funcional hasta la contracción visible.

**Time:** determina el tiempo de tratamiento, en el caso de utilizar los programas A y B el tiempo de tratamiento recomendado es de 45min., para tratamientos con los programas C y D el tiempo de tratamiento recomendado será de 20-30minutos máximo.

**Play y Pause:** para comenzar a emitir o pausar el equipo cuando lo necesitemos.

Los electrodos se colocarán de la siguiente forma: el cable rojo será el polo positivo y este electrodo debe colocarse en el punto motor o vientre muscular. El cable negro será el polo negativo y se colocará en el electrodo cerca de la inserción muscular.

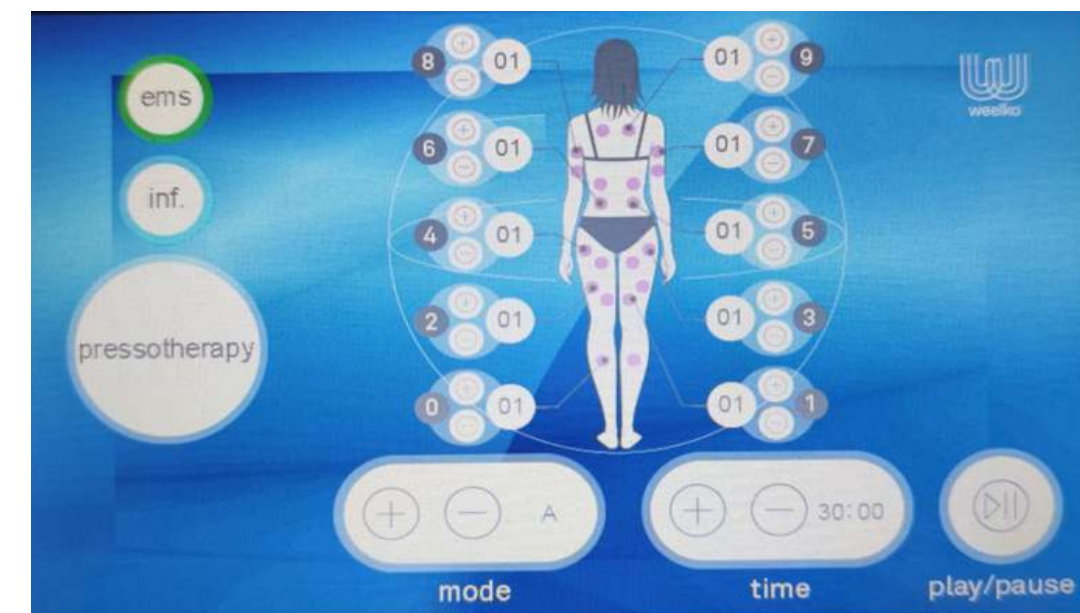

# HighTech Combi Fit

## WKB009



### EMS

La electroestimulación consiste en la utilización de corriente eléctrica para inducir una contracción muscular. Este equipo tiene 10 pares de electrodos de estimulación eléctrica con una onda pulsada, que nos va a proporcionar pulsos eléctricos para trabajar a nivel de estimulación muscular y bioeléctrica, mejorando su función, acelerando el metabolismo de las grasas, trabajando el adelgazamiento y la tonificación muscular.

Al aplicar la electroterapia para fortalecimiento muscular, los electrodos deben posicionarse uno en el punto motor o en el vientre muscular y el otro en la extensión del músculo, para que la electroestimulación permita al cliente realizar una contracción isométrica fuerte y efectiva, de este modo la corriente viajará entre los dos electrodos de un polo al otro y en dirección de las fibras musculares, para lograr máxima efectividad, de modo que para estimular los músculos superficiales se debe colocar los electrodos paralelamente a la dirección de las fibras musculares y para los tejidos profundos debes colocar los electrodos de forma transversal.

Los electrodos deben estar separados entre sí unos 5cm., aplicar suficiente gel conductor y ajustarlos al cliente con las bandas elásticas.

En cuanto a la disposición de los electrodos a nivel de abdomen se colocará un par por debajo de las últimas costillas (por encima del ombligo) y, el segundo par de electrodos o distal, por debajo del ombligo a la altura de las crestas ilíacas.

### **Tiempo de tratamiento:**

El tiempo debe ajustarse en función a los objetivos deseados y la zona a tratar. Si se busca fortalecimiento muscular, se recomiendan unos 10 a 20min. Para reeducar un músculo, por lo general esto no lleva más de 20 minutos en una sola sesión. En el caso de los tratamientos estéticos de 30 a 45 minutos, de 6 a 8 sesiones, 2 o 3 máx. por semana.



# HighTech Combi Fit

## WKB009



### EMS

Este equipo posee 4 modos de trabajo:

**Modo A**, estimula a la frecuencia de 10Hz, principalmente recomendado para tratamientos de flacidez leve, para personas sensibles a la electroestimulación, para relajación muscular (anestésico). Favorece la circulación, y mejora resistencia aeróbica.

**Modo B**, estimula a la frecuencia de 20Hz, principalmente para tratamientos de flacidez media, más tolerable en músculos pequeños, mejora resistencia aeróbica muscular y la capacidad oxidativa muscular.

**Modo C**, estimula a la frecuencia de 30Hz, principalmente para tratamientos de flacidez media, músculos de mayor tamaño, mejora tono, la definición y la firmeza muscular, fortalecimiento y reeducación muscular.

**Modo D**, estimula a una frecuencia de 40Hz, principalmente para tratamientos de flacidez intensa, contracciones fuertes, mejora capacidad del músculo e incrementa el volumen muscular, fuerza y resistencia, disminución de edema usando el bombeo muscular.

# HighTech Combi Fit

## WKB009



### Indicaciones

- Tratamiento de retención de líquidos, edemas y linfedemas.
- Tratamiento de eliminación de grasas y toxinas.
- Tratamiento de piernas cansadas.
- Coadyuvante en tratamientos para la disminución de grasa localizada.
- Tratamientos para mejorar la circulación en pacientes con hipertensión y diabetes.
- Ayuda a mejorar el aspecto de piel de naranja.
- Tratamiento y prevención de signos varicosos.
- Estimulación circulatoria.
- Recuperación de la circulación linfática post operatoria.
- Tonificación muscular.
- Oxigenación del organismo.

# HighTech Combi Fit

## WKB009



### Contraindicación de los EMS

- Epilepsia.
- Marcapasos.
- Desórdenes y problemas de circulación.
- Heridas en la piel, eczema o rozadura.
- Diabetes.
- Tromboflebitis y varices.
- No debe realizarse en el área de los ojos, ni a nivel del cuello, ni sobre el corazón.
- Hemorragias recientes, irritación de piel, quemaduras o heridas.
- Alergias e irritaciones de la piel.
- Alteraciones en la sensibilidad o déficit sensitivo.

# HighTech Combi Fit

## WKB009



### Contraindicaciones generales

Por ser un tratamiento muy controlado, son pocas las contraindicaciones, sin embargo, es importante consultar al profesional médico-estético antes de realizarlo.

- Problemas cardiovasculares severos.
- Flebitis.
- Enfermedades infecciosas.
- Enfermedades de la piel y posibles infecciones activas.
- Enfermedades inmunodeficientes o pacientes oncológicos.
- Problemas hormonales.
- En mujeres embarazadas, sólo pueden tratarse piernas y brazos, en presión de aire muy baja y siempre bajo prescripción médica.
- No puede utilizarse en personas con epilepsia, marcapasos o cualquier condición psicológica o médica grave.
- No es recomendable el uso en personas con problemas de claustrofobia.

# HighTech Combi Fit

## WKB009




### Advertencias

- Es importante tener la precaución de no apretar demasiado el traje al cuerpo del cliente, para evitar hacer daño si la presión del aire es muy fuerte, la regulación de la presión siempre será a tolerancia.
- Si el traje está roto o envejecido, por favor, sustitúyalo por uno nuevo, para evitar quemaduras accidentales de la piel o descargas eléctricas.
- Compruebe con el cliente a lo largo del tratamiento que la temperatura es la adecuada.
- Se recomienda que el cliente beba mucha agua antes y después del tratamiento.
- Utilice un protector de celulosa bajo el traje de presoterapia para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.
- No deje el traje calentándose sin ningún paciente dentro.
- No coloque ningún líquido en el equipo.
- Tenga cuidado con las conexiones eléctricas.
- Por favor, desmonte y monte el equipo por personal profesional.
- En caso de malfuncionamiento del aparato compruebe cuidadosamente todas las conexiones y contacte con un servicio técnico en caso de duda.

**Yubitzay Avila**  
**Customer Training**  
T. +34 93 824 9020  
y.avila@weelko.com  
S. Yubitzay Avila

**Weelko Barcelona S. L.**  
Pol. Ind. La Valldan  
Camí de Garreta, 92  
08600 Berga  
Barcelona – Spain  
T. +34 93 824 9020  
info@weelko.com  
www.weelko.com

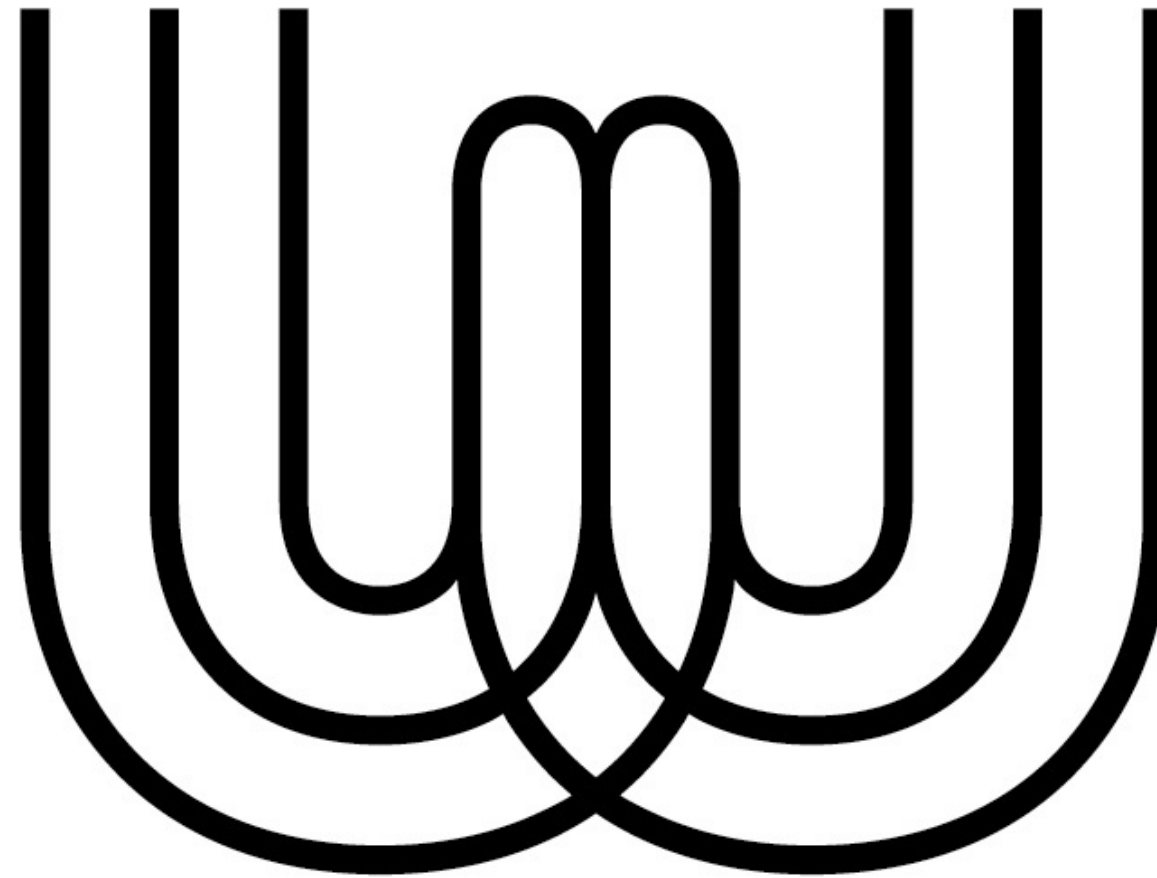

**weelko**



**@weelkobarcelona**