



weelko

HighTech EMS WKB008



Électrostimulation



HighTech EMS WKB008



Électrostimulation

Appareil

- 10 électrodes taille grande.
- 10 électrodes taille petite.
- 2 câbles avec connecteurs de 10 sorties.
- 20 bandes élastiques avec fermeture velcro.
- Unité principale.

Avis: Les appareils arrivent avec une protection adhésive en plastique très fine qui protège l'écran contre possibles rayures pendant l'emballage. Retirez cette protection dès réception de l'appareil.



HighTech EMS WKB008



Électrostimulation

Équipement

Notre WKB008 est un appareil multifonction digital avec écran tactile à électrostimulation avec microcourant pulsé. Il inclut 20 électrodes (10 grands et 10 petits), deux connecteurs et des bandes élastiques pour les tenir au corps. Il est idéal pour des traitements à améliorer la circulation, faciliter l'élimination de graisse moyennant l'activation du drainage lymphatique, ainsi que l'oxygénation cellulaire et la détente musculaire. Il sera notre principal allié pour les traitements corporels, le renforcement musculaire et la rééducation motrice.

Pour brancher l'appareil correctement, il faut se faire sur le panneau arrière. De gauche à droite, vous devez suivre les instructions suivantes:

- Branchez le cordon d'alimentation (200-240V 50Hz).
- Branchez correctement les tuyaux avec les deux connecteurs d'électrostimulation. Le premier connecteur pour EMS du 0 au 4 et le deuxième du 5 au 9.
- Pour allumer l'appareil, il faut appuyer sur le bouton du panneau frontal et taper sur le logo Weelko qui apparaît sur l'écran pour procéder à choisir le menu souhaité. Choisissez « EMS » pour l'électrostimulation.



HighTech EMS WKB008



EMS


Mode: dans la fonction EMS, le menu « MODE » permet de choisir la fréquence de travail par électrostimulation en 4 programmes: A, B, C et D.

Intensité: règle l'intensité de chaque électrode de façon indépendante, d'1 à 15. Dans le cas des programmes C et D, l'intensité doit être suffisante pour une activité fonctionnelle jusqu'obtenir une contraction visible.

Time: permet de sélectionner le temps du traitement. Pour les programmes A et B le temps recommandé est 45 minutes. Pour les programmes C et D, le temps recommandé est 20-30 minutes maximum.

Play et Pause: pour commencer ou pauser le traitement si nécessaire.

Appliquez les électrodes comme il suit: le câble rouge est le pôle positif et il doit se placer sur le point moteur ou le ventre du muscle. Le câble noir sera le pôle négatif et il doit se placer sur l'électrode près de l'insertion du muscle.

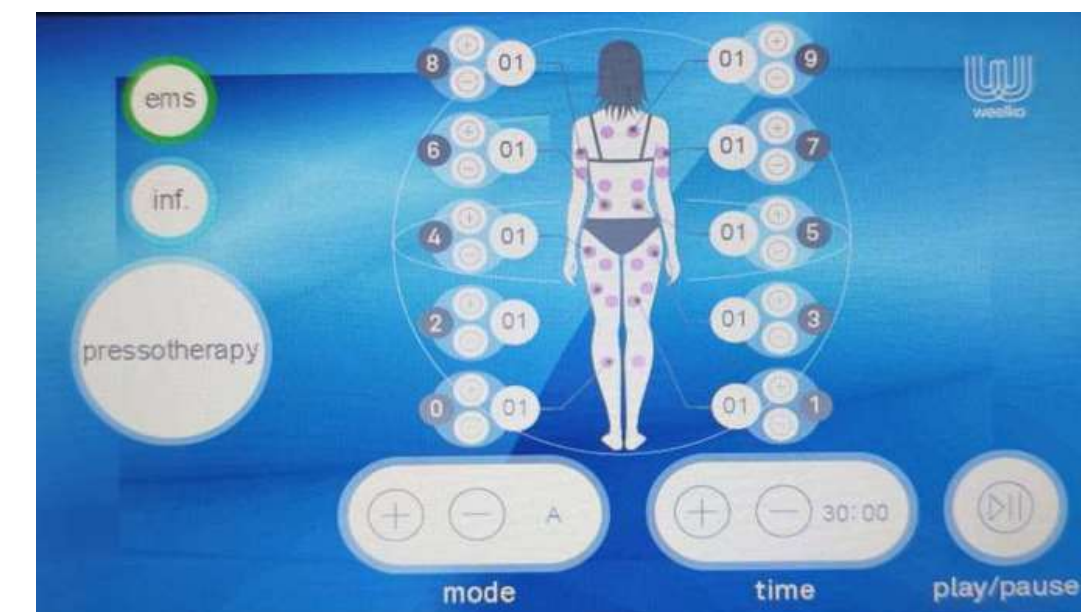

HighTech EMS

WKB008



EMS

L'électrostimulation utilise le courant électrique pour provoquer une contraction musculaire. Cet appareil possède 10 paires d'électrodes de stimulation électrique par onde pulsée, ce qui va provoquer des pulses électriques pour travailler la stimulation musculaire et bioélectrique, en améliorant sa fonction, en accélérant le métabolisme des graisses, l'amincissement et la tonification musculaire.

Quand vous utilisez l'électrothérapie pour renforcer le muscle, un des électrodes doit s'appliquer sur le point moteur ou le ventre du muscle et l'autre sur l'extension du muscle, afin que l'électrostimulation puisse réaliser une contraction isométrique forte et effective. De cette façon, le courant se déplacera entre les deux électrodes, d'un pôle à l'autre, et dans le sens des fibres musculaires, pour un maximum d'efficacité. Pour stimuler les muscles superficiels, il faut appliquer les électrodes parallèlement dans le sens des fibres musculaires. Pour stimuler les tissus les plus profonds, appliquez les électrodes de façon transversale.

Les électrodes doivent s'appliquer séparés les uns des autres 5 cm. Appliquez du gel conducteur sur l'électrode avant de le mettre en contact avec la peau. Utilisez les bandes élastiques afin de mieux fixer l'électrode à la zone à traiter. Quant à l'application des électrodes au niveau de l'abdomen, un électrode se placera par-dessous des dernières côtes (au-dessus du nombril) et le deuxième paire l'électrodes ou distal, au-dessous du nombril, sur la crête iliaque.

Temps de traitement :

Le temps doit se régler selon les résultats souhaités et la zone à traiter. Si l'on cherche à renforcer les muscles, entre 10 et 20 minutes sont recommandés. La rééducation musculaire, en général, ne prend pas plus de 20 minutes dans une seule séance. Dans le cas des traitements esthétiques, le temps recommandé est de 30 à 45 minutes, de 6 à 8 séances, 2 ou 3 fois max. par semaine.

HighTech EMS

WKB008



EMS

Cet appareil possède 4 modes de travail:

Mode A, stimule à la fréquence de 10Hz, principalement recommandé pour traiter la flaccidité légère, pour des personnes sensibles à l'électrostimulation, pour la relaxation musculaire (anesthésique). Il favorise la circulation sanguine et améliore la résistance aérobique.

Mode B, stimule à la fréquence de 20Hz, principalement utilisé pour traiter la flaccidité moyenne, plus tolérable sur les muscles plus petits. Il améliore la résistance aérobique musculaire et la capacité oxydative musculaire.

Mode C, stimule à la fréquence de 30Hz, principalement utilisé pour traiter la flaccidité moyenne, sur des muscles plus grands. Il améliore la tonification musculaire, la définition et la fermeté, ainsi que le renforcement et la rééducation musculaire.

Mode D, stimule à la fréquence de 40Hz, principalement utilisé pour traiter la flaccidité intense, avec des contractions fortes. Il améliore la capacité du muscle et augmente le volume musculaire, la force et la résistance. Il permet de diminuer l'œdème grâce au bombage musculaire.

HighTech EMS

WKB008



Indications

- Traitements contre la rétention de liquides, œdème et lymphœdème.
- Traitements pour éliminer les graisses et toxines.
- Traitements de jambes lourdes.
- Adjuvant dans les traitements pour la réduction de la graisse localisée.
- Traitements pour améliorer la circulation chez les patients souffrant d'hypertension et diabète.
- Amélioration de l'apparence de la peau d'orange.
- Traitement et prévention des signes variqueux.
- Stimulation circulatoire.
- Récupération de la circulation lymphatique postopératoire.
- Tonification musculaire.
- Oxygénation de l'organisme.

HighTech EMS

WKB008



Contre-indications de l'EMS

- Épilepsie.
- Personnes avec stimulateur cardiaque.
- Problèmes circulatoires.
- Maladies de la peau, eczéma ou irritations.
- Diabète.
- Thrombophlébite et varices.
- Ne pas utiliser sur la zone des yeux, du cou ou du cœur.
- Hémorragies récentes, irritation de la peau, brûlures ou blessures.
- Allergies cutanées.
- Altérations de la sensibilité ou déficit sensitif.

HighTech EMS

WKB008



Contre-indications générales

Le fait qu'il soit un traitement très contrôlé implique qu'il ait peu de contre-indications. Néanmoins, il faut absolument voir avec le professionnel dans le domaine médical ou esthétique avant de l'utiliser.

- Problèmes cardiovasculaires sévères.
- Phlébite.
- Maladies infectieuses.
- Maladies de la peau et possibles infections actives.
- Maladies immunodéficientes ou patients oncologiques.
- Problèmes hormonaux.
- Il n'est pas recommandé pour des personnes en souffrant de claustrophobie.

HighTech EMS

WKB008



Avertissements

- Vérifiez avec le client que le courant est approprié le long du traitement.
- Le client devrait boire de l'eau avant et après le traitement.
- Ne jetez aucun liquide sur l'appareil.
- Faites attention aux raccordements électriques.
- Si besoin de manipuler ou démonter l'appareil, il faut absolument qu'il soit fait par votre distributeur avec l'autorisation du fabricant.
- En cas de dysfonctionnement, vérifiez avec attention que tous les branchements sont bien faits et contactez votre distributeur.

Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com



@weelkobarcelona