

INDICE	
Descrizione torre multifunzione B-System	2
Componenti B-Equipment e le loro funzioni	4
Come ottenere i migliori risultati dal B-System?	6
Montaggio e installazione	7
Dati tecnici	12
Informazione web	15

La Multitorre **B-System** di Weelko

Vuoi offrire un servizio completo ai tuoi clienti, ma hai poco spazio? Grazie alla versatilità del B-System, puoi costruire la tua postazione di lavoro su misura.



Espandi la tua offerta di trattamenti al tuo ritmo!

Il nostro ZOOM tecnico ti mostra tutti i dettagli, le funzioni e ti dà la possibilità di conoscere le nostre apparecchiature. Il compatto strumento multifunzione B-System nel mirino di Weelko. Scoprilolo!

DESCRIZIONE E COMPONENTI DELLO STRUMENTO B-SYSTEM (REF. 3021) DI WEELKO

La torre multifunzione B-System

Per mantenere un aspetto sano e giovanile, è necessario prendersi cura della salute su tutti i livelli regolarmente, cosa che contribuirà, senza dubbio, a mantenere una pelle molto più sana.

La torre multifunzione B-System di Weelko (Ref. 3021) offre la possibilità di combinare diverse funzioni per creare uno strumento di lavoro ideale, su misura per ogni professionista.

Componenti e funzioni del B-System

Gli strumenti imprescindibili vengono di serie insieme alla torre, e sono un vaporizzatore, una lampada-lente, un carrello multifunzionale e uno scaldasalviette. La torre è dotata anche di 6 spazi modulari per personalizzare il B-System in base alle esigenze specifiche di ogni momento. Nel nostro catalogo troverai la serie B-EQUIPMENT, composta da 9 apparecchiature dalle diverse funzioni per completare la torre multifunzione. Tra di essi puoi trovare il peeling ultrasonico, gli ultrasuoni, il galvanico, l'alta frequenza, il brossage, il vacuum&spray, i guanti ad alta conducibilità e bio-lifting, il martello freddo e caldo e la microdermoabrasione con punte di diamante. Scopri qui sotto tutte le funzioni e crea il tuo proprio B-System!



Componenti in dotazione

VAPORIZZATORE (Ref. F-300DT)

In ogni trattamento cutaneo, il vaporizzatore è uno strumento indispensabile che fornisce molteplici benefici alla pelle. Ad esempio, ammorbidisce la pelle e le cellule morte prima del trattamento di pulizia del viso; apre i pori per una pulizia profonda; contribuisce alla rimozione del sebo, dei punti neri, delle tracce di trucco e delle impurità; aiuta a liberare la pelle dalle tossine naturali; leviga le rughe prima di un trattamento; aumenta la circolazione sanguigna,



idrata la pelle, ne migliora il metabolismo e contribuisce alla sua rigenerazione. L'ozono applicato attraverso il vapore ha un'azione germicida, sterilizzatrice ed un effetto antinfiammatorio. Inoltre, il vaporizzatore F-300DT include l'opzione di aromaterapia, grazie alla quale il paziente si sente ulteriormente avvolto da una piacevole sensazione di rilassamento. È sufficiente versare delle gocce di olio essenziale sul feltro che si trova nel pratico serbatoio del beccuccio dal facile accesso.

Tabella di trattamenti con il vaporizzatore in base al tipo di pelle

(Indicazioni orientative che il professionista dovrà valutare per ogni caso)

Tipo di pelle	Distanza	Durata
Pelli grasse o con cattiva circolazione	35-40cm	15 Minuti appross.
Pelli normali e sane	35-40cm	10 Minuti appross.
Pelli secche o sensibili	40-45cm	5 Minuti appross.
Capillari dilatati o vasculite	40cm	5 Minuti appross.



LAMPADA-LENTE AMPLI (REF. 1005T)

La lampada-lente di ingrandimento dal moderno design AMPLI (Ref. 1005T) è dotata di diodi LED, che hanno una lunga vita utile, permettono un notevole risparmio di energia elettrica (rispetto alle altre lampade a luce fredda) e sono inoltre meno suscettibili a rompersi. Questa lampada è ideale per tutti i tipi di trattamenti dei centri estetici (diagnosi della pelle, ispezione della pelle pre e post trattamento, trucco semipermanente, tintura di ciglia....).

SCALDASALVIETTE WARMEX (Ref. T-01)

Uno strumento essenziale per offrire quel momento speciale di relax dei trattamenti. WARMEX è dotato di luce ultravioletta dall'effetto germicida, per avere sempre a disposizione le salviette umide e calde in perfette condizioni.



Moduli B-EQUIPMENT per completare l'unità

Weelko ti mette a disposizione 9 funzioni basiche di trattamenti facciali, grazie alle quali puoi personalizzare la tua torre. Il carrello è composto da 6 spazi modulari (da completarsi tra le 9 funzioni descritte qui di seguito). Un altro vantaggio del B-System è che non devi decidere tutto subito, puoi completare la tua torre a poco a poco!

PEELING ULTRASONICO (REF. F-311A)

Il peeling ultrasonico esfolia, pulisce a fondo e stimola la rigenerazione cellulare della pelle. La spatola trasmette alla pelle onde a frequenza molto bassa e vibrazioni, che rompono in particelle minuscole la sporcizia aderita all'epidermide, e ammorbidiscono la pelle senza bisogno di utilizzare il vapore. Ciò consente di rimuovere facilmente le cellule morte, i punti neri, i detriti e la sporcizia dalla pelle senza danneggiarla e minimizzando il dolore. Il risultato: pelle idratata, luminosa e dall'aspetto più giovane. È necessario applicare un tonico desincrostante, la pelle deve essere umida durante il trattamento.



ULTRASUONI (REF. F-312A)

Con l'applicazione degli ultrasuoni si ottiene la riduzione delle rughe e delle cicatrici, oltre all'idratazione della pelle ed alla penetrazione dei principi attivi nella pelle. Gli ultrasuoni agiscono riattivando la circolazione sanguigna, aumentando l'ossigenazione della pelle stimolando la formazione del collagene e la rigenerazione cellulare. Il dispositivo Weelko consente di scegliere il tipo di onda, continua per pelli normali e per le aree più spesse di pelle, combinata per le zone di pelle più sottili, e pulsata per pellisensibili. Questo trattamento non ricorre all'uso di prodotti chimici, ed è necessario l'utilizzo di un gel conduttore, mai applicare sulla pelle asciutta.



GALVANICO (REF. F-313A)

L'apparecchiatura Weelko a corrente galvanica implica un miglioramento rispetto ai dispositivi tradizionali, in cui il paziente doveva impugnare la barra durante il trattamento. Il B-Equipment di Weelko funziona quando entrambi i manipoli sono in contatto con la pelle da trattare. Si possono effettuare dei trattamenti di disincrostazione, per ammorbidire e liquefare i depositi di grasso, che sono l'accumulo di sebo nei follicoli, e dei trattamenti di ionizzazione per potenziare la penetrazione di una lozione o di una crema nella pelle. Applica una crema acida o alcalina, e in base a ciò seleziona la polarità dell'elettrodo, poiché lo strumento deve essere impostato con la stessa polarità del prodotto.



ALTA FREQUENZA (REF. F-314A)

Questa funzione viene utilizzata per pulire la pelle, eliminare i batteri della pelle, regolare l'attività ghiandolare, e preparare la pelle prima del trattamento galvanico, migliorando la penetrazione del prodotto nella pelle. L'elemento conduttivo all'interno dell'elettrodo può essere argon, che provoca il caratteristico color blu-viola e serve per disinfettare, o neon, dal colore arancione, che tonifica la pelle. Non applicare nessun prodotto durante questo trattamento.

**BROSSAGE (REF. F-315A)**

Il processo di esfoliazione meccanica per mezzo di spazzole rimuove le cellule morte e la sporcizia dalla pelle, come il sudore o le tracce di trucco. Grazie a un gradevole massaggio anche la circolazione sanguigna è stimolata. La velocità di rotazione della spazzola è regolabile. Si raccomanda l'uso di un prodotto esfoliante e umidificare la spazzola prima di iniziare il trattamento.

**VACUUM & SPRAY (REF. F-316A)**

La funzione di suzione è la grande alleata dell'estrazione di comedoni, acne, punti neri, sporcizia quotidiana, grasso persistente e trucco. Con la polverizzazione di un tonico si riducono le aree visibili di infiammazione o arrossamento. Questa funzione aerosol aiuta anche a dar sollievo alla pelle dopo la suzione.

**GUANTI AD ALTA CONDUCIBILITÀ E BIO-LIFTING (REF. F-317A)**

Il massaggio con guanti o elettrodi ad alta conduttività migliora la struttura della pelle in quanto attiva il collagene e l'elastina. La sua funzione è quella di stimolare la produzione di ATP, e fornire più energia alle cellule, aumentando la produzione di fibroblasti, fornendo più energia ai nostri muscoli e tessuti per ottenere un effetto rassodante e tonificante. È un trattamento indolore e non si percepisce alcun movimento o contrazione muscolare, in quanto è una corrente simile alla corrente generata dal corpo. La sua intensità è molto bassa e il suo carico è insufficiente per stimolare le fibre nervose periferiche, quindi la sua applicazione è a livello sub-sensoriale. Il cliente generalmente non percepisce il passaggio di corrente ma vedrà gli effetti della riparazione dei tessuti. In entrambi i casi è necessario utilizzare gel conduttivo ed inumidire i guanti.



MARTELLLO FREDDO E CALDO (REF. F-318A)

Il calore rilasciato dal martello migliora la circolazione sanguigna, rilassa i muscoli ed apre i pori, sia per migliorare la penetrazione del prodotto nella pelle, sia per prepararla a una pulizia profonda. Il lato freddo del martello si usa per dar sollievo alla pelle dopo i trattamenti microdermoabrasione, per chiudere i pori e per ridurre le rughe. Non c'è bisogno di applicare del prodotto in nessuno dei due casi.



MICRODERMOABRASIONE CON PUNTE DI DIAMANTE (REF. F-319A)



La microdermoabrasione è una esfoliazione controllata, precisa e progressiva dello strato corneo (strato esterno dell'epidermide) ed il risultato è una pelle morbida, fresca e pulita. È particolarmente adatta contro il fotoinvecchiamento, le cicatrici da acne, le smagliature, i comedoni, e per preparare la pelle all'applicazione di sostanze nutritive. Si tratta di un trattamento per pelli sia giovani che adulte, non invasivo, indolore e non è necessario applicare nessun prodotto. I risultati sono visibili alla fine di ogni sessione.

Ricorda che tutte le apparecchiature della serie B-Equipment si possono anche sistemare su una superficie piana, su un carrello per esempio.

Ottieni i migliori risultati dal tuo B-System!



Di seguito ti proponiamo alcuni suggerimenti su come combinare le funzioni e sfruttare tutto il potenziale della tua torre multifunzione:

- Colloca una salvietta previamente scaldata sulla fronte del paziente per preparare e rilassare la pelle prima del trattamento.
- Versa qualche goccia di olio essenziale nel feltro del beccuccio del vaporizzatore, ma ricorda di non versare mai gli oli essenziali direttamente nel recipiente dell'acqua.
- Prepara la pelle ed apri i pori con il vaporizzatore o utilizza il calore del martello.
- Effettua l'estrazione con l'aiuto della lampada-lente Ampli.
- Rimuovi le impurità della pelle e la sporcizia che si accumula giornalmente con una lozione detergente e l'azione del peeling ultrasonico.
- Inizia la sessione di esfoliazione profonda con la tua apparecchiatura di microdermoabrasione con punte di diamante.
- Per chiudere i pori e calmare e ammorbidire la pelle usa l'estremo freddo del martello.
- Applica una lozione rinfrescante e idratante o una crema di protezione solare (a seconda del periodo dell'anno e del clima).


MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

Qui di seguito si mostrano gli elementi che compongono il carrello multifunzione.


PARTE PRINCIPALE

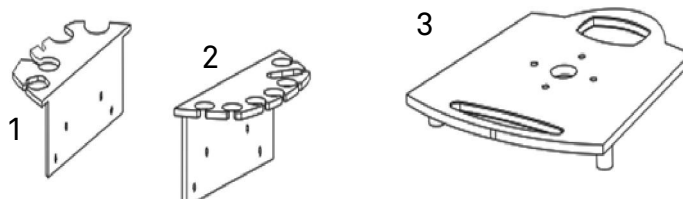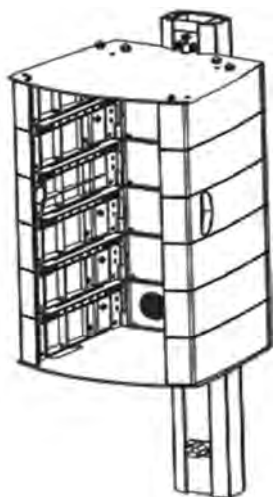

1. Supporto per gli accessori (sinistro)
2. Supporto per gli accessori (destra)
3. Ripiano superiore di vetro

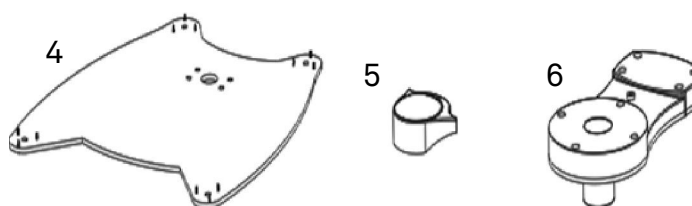

4. Base del carrello
5. Rivestimento di plastica per le ruote
6. Supporto per il vaporizzatore

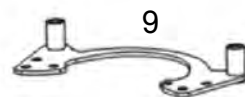

7. Cavo d'alimentazione
8. Ruote
9. Supporto per la lampada-lente

Montaggio delle ruote e della base:

Avvitare le ruote alla base. Per far ciò è possibile utilizzare gli utensili di lavoro inclusi nella confezione (Immagini 1 e 2)


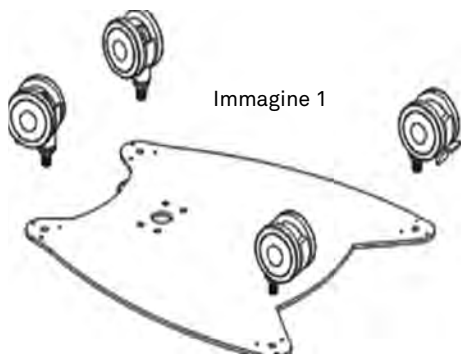


Immagine 2

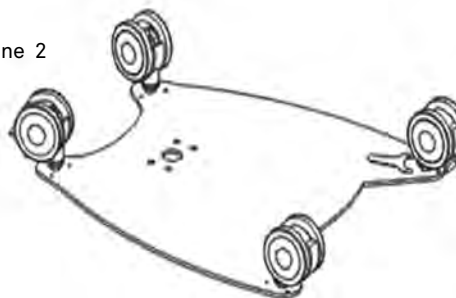

Posizionare i rivestimenti di plastica delle ruote correttamente e fissarli con le viti (Immagini 3 e 4)

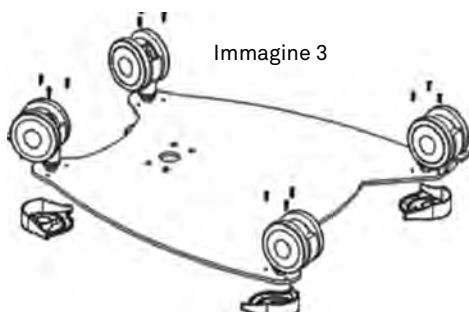


Immagine 3



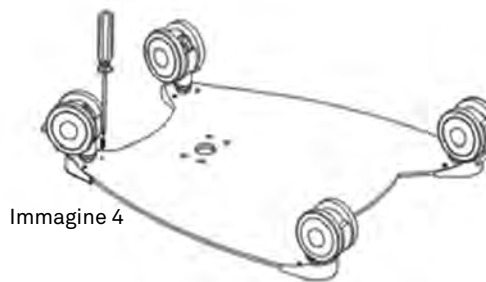


Immagine 4


Girare la base per montarvi sopra la torre (Immagini 5)

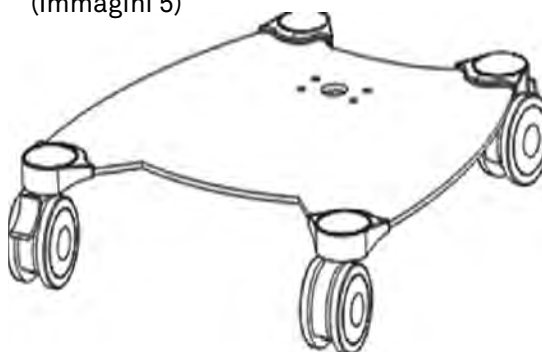


Collocare le viti per fissare il supporto della lampada-lente (Immagini 6)

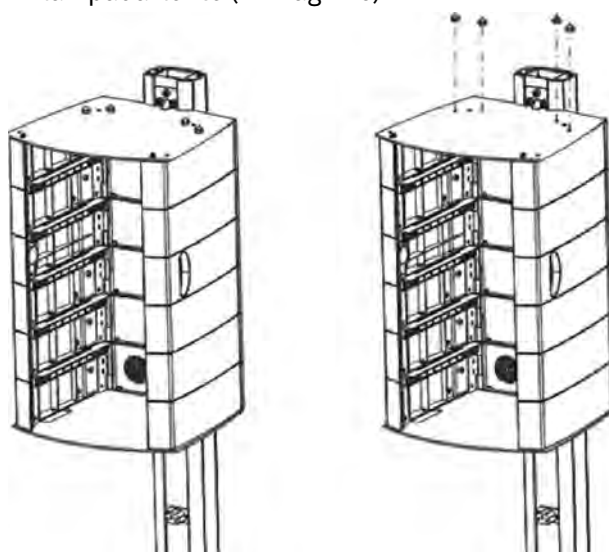

Collocare la torre in posizione laterale e avvitare la base ed il supporto della lampada-lente (Immagine 7)

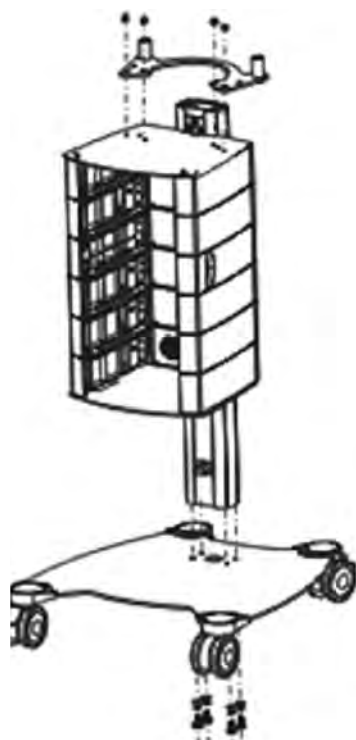

Avvitare il ripiano di vetro (Immagine 8)

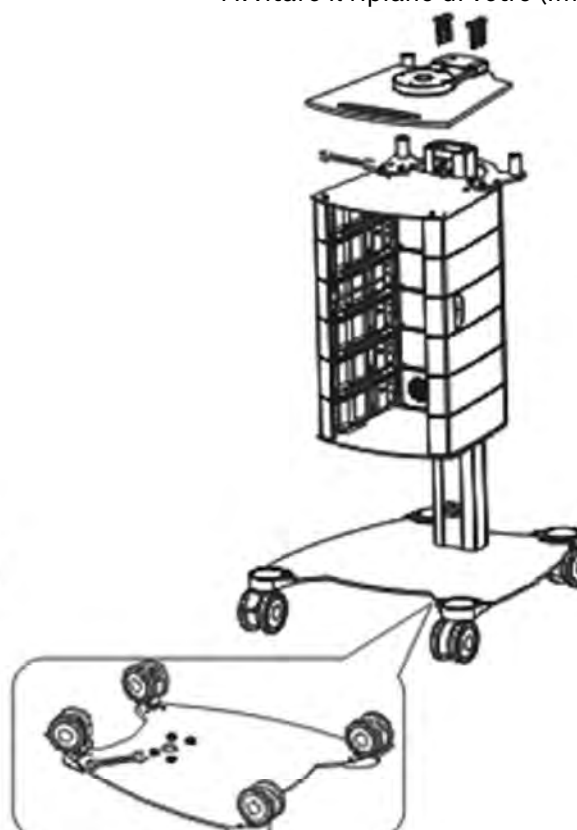

Dopo aver montato la torre, avvitare i supporti laterali per gli accessori. Avvitare anche il supporto per il vaporizzatore con la chiave allen (Immagine 9). Adesso è possibile inserire il vaporizzatore sul suo supporto. (Immagine 10).

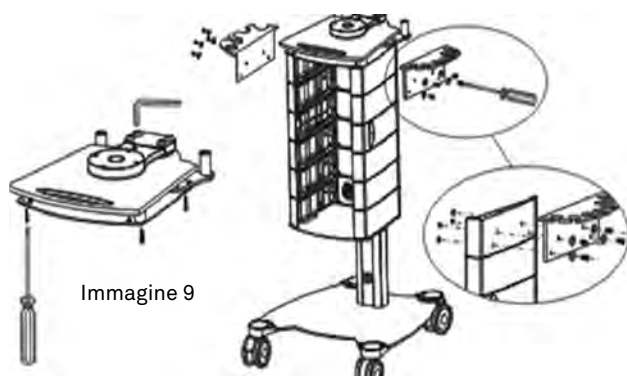


Immagine 9

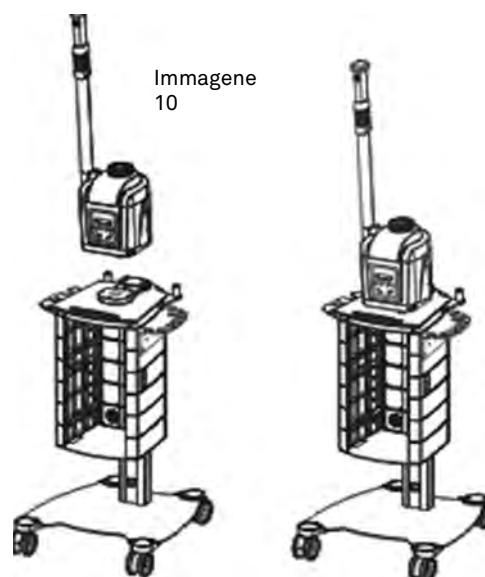


Immagine 10

Disimballare le apparecchiature B-Equipment che configurano il tuo B-System personalizzato. Inserirle con attenzione negli spazi modulari. Assicurarsi di inserirli correttamente nella torre spingendoli con una leggera pressione fino in fondo (Immagine 11). Una volta inseriti tutti i moduli, avvitare le apparecchiature una a una (Immagine 12).

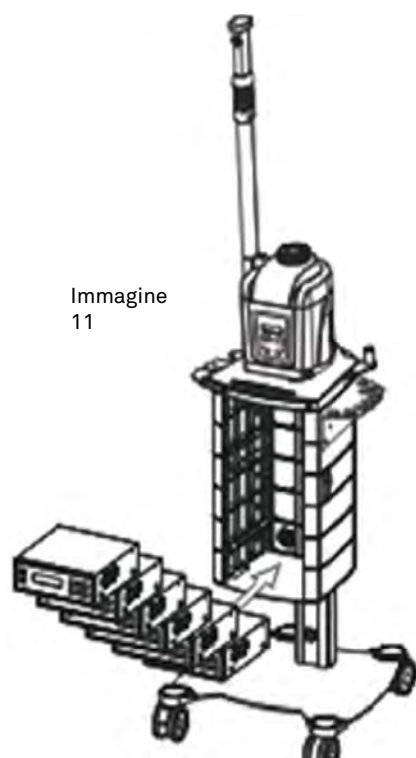


Immagine 11



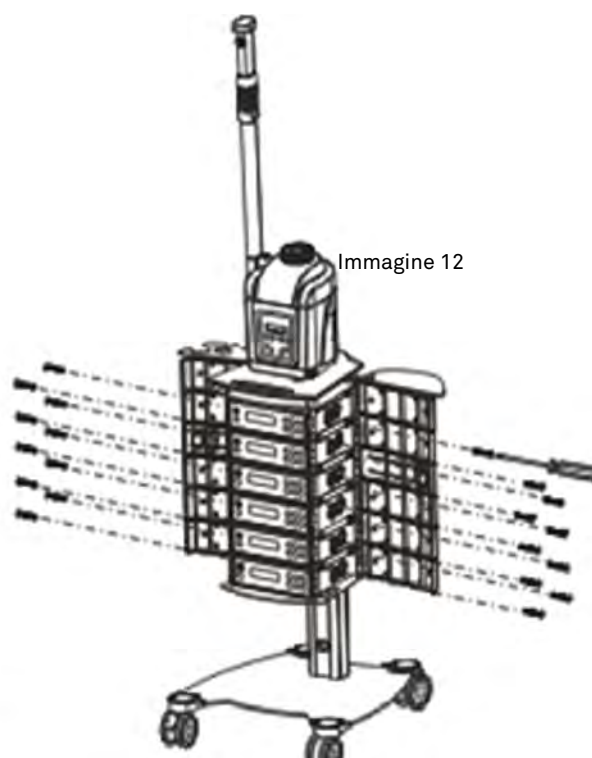


Immagine 12


È adesso possibile collocare lo scaldasalviette. Verificare che non restino dei residui di imballaggio sulla base. Serrare bene lo scaldasalviette contro la colonna per assicurarsi che sia ben connesso. (Immagine 13).

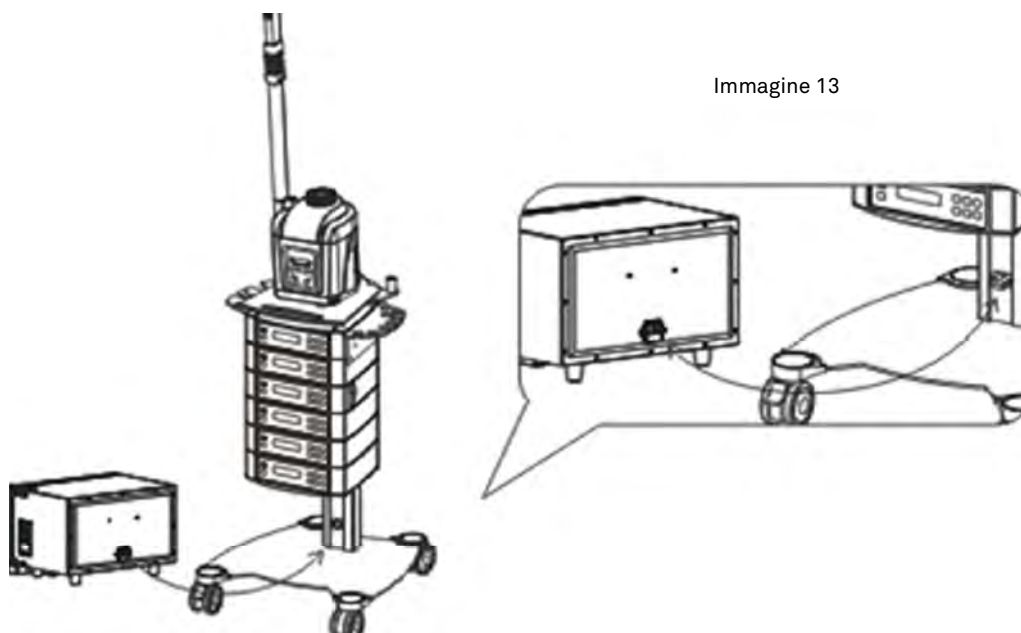

Riporre gli accessori nei supporti e collegarli nelle rispettive apparecchiature (Immagine 14). Per far ciò, lasciare gli sportelli della torre aperti e far passare ciascun cavo attraverso l'apertura inferiore dello sportello. Verificare che nessun cavo rimanga agganciato e chiudere gli sportelli della torre (Immagine 15).

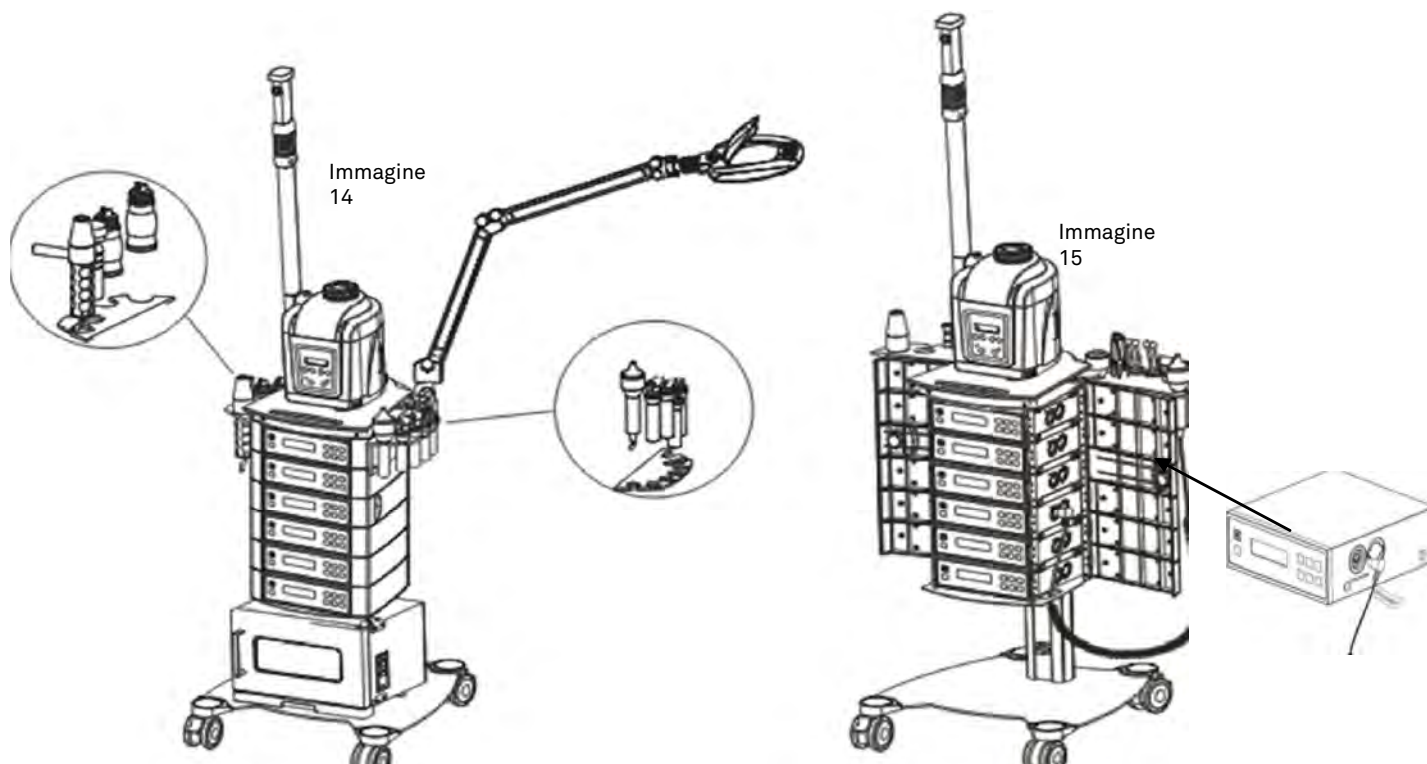

Inserire la lampada nel suo supporto e connetterla alla presa nella parte posteriore della colonna (Immagine 16). Connettere il cavo d'alimentazione della presa della colonna e nella presa della corrente del tuo studio. Il tuo B-System è pronto! Leggere attentamente le istruzioni d'uso di ciascuna apparecchiatura e sterilizza gli accessori prima di utilizzarli con i pazienti.

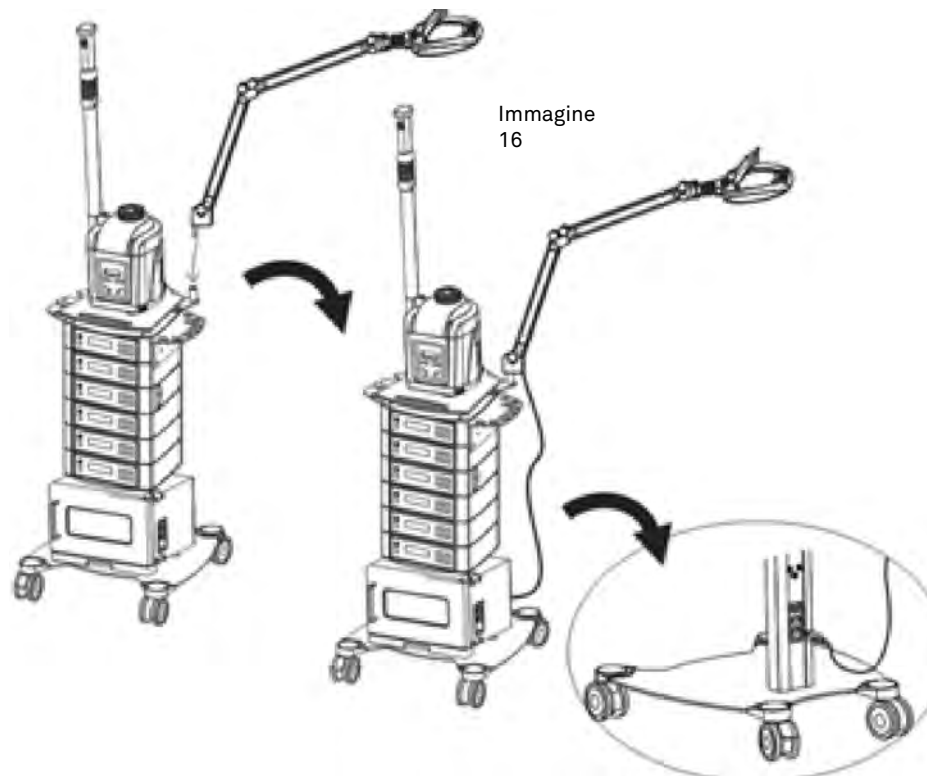

DATI TECNICI**VAPORIZZATORE B-SYSTEM (REF. F-300DT):**

Impostazioni	Altezza beccuccio (braccio a 45°)	140 cm
	Rotazione del braccio	150°
	Rotazione del beccuccio	3D
	Tempo di preriscaldamento	6 minuti (appross.)
Prestazioni	Capacità del recipiente dell'acqua	1,3 litri
	Ozono con accensione indipendente	
	Portaessenze	
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	800 W

LAMPADE-LENTE AMPLI (REF. 1005T)

Prestazioni	3 diottrie con punto focale da 5 diottrie	
	Regolazione dell'intensità in due posizioni fisse	
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	6 W

SCALDASALVIETTE (REF. T-01)

Prestazioni	Capacità	7 litri
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220V—240V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	164 W

PEELING ULTRASONICO B-EQUIPMENT (REF. F-311A)

Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro	6 W
	Frequenza di lavoro	25-27 KHz
	Tempo di lavoro prestabilito	15 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	20 W

ULTRASUONI B-EQUIPMENT (REF. F-312A)

Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro	0-3 W
	Frequenza di lavoro	1 MHz
	Tempo di lavoro prestabilito	15 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	20 W

GALVANICO B-EQUIPMENT (REF. F-313A)

Caratteristiche di lavoro	Intensità di lavoro	30-500 μ A
	Potenza di lavoro	0-3 W
	Voltaggio	30 V
	Tempo di lavoro prestabilito	15 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	20 W

ALTA FREQUENZA B-EQUIPMENT (REF. F-314A)

Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro	12 W
	Frequenza di lavoro	650.000 GHz
	Tempo di lavoro prestabilito	15 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	20 W

BROSSAGE B-EQUIPMENT (REF. F-315A)

Caratteristiche di lavoro	Velocità di rotazione	0 - 550 RPM
	Tempo di lavoro prestabilito	3 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	20 W

VACUUM&SPRAY B-EQUIPMENT (REF. F-316A)

Caratteristiche di lavoro	Pressione di suzione	0 ~ -0,07 MPa
	Tempo di lavoro prestabilito	15 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	120 W

GUANTI AD ALTA CONDUCIBILITÀ E BIO-LIFTING B-EQUIPMENT (REF. F-317A)

Caratteristiche di lavoro	Intensità di lavoro	50 a 600 μ A
	Potenza di lavoro	2 W
	Voltaggio	30 V
	Tempo di lavoro prestabilito	3 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	20 W

MARTELLO FREDDO E CALDO B-EQUIPMENT (REF. F-318A)

Caratteristiche di lavoro	Temperatura	5°C a 40°C
	Tempo di lavoro prestabilito	15 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	20 W

MICRODERMOABRASIONE CON PUNTE DI DIAMANTE B-EQUIPMENT (REF. F-319A)

Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro	65 W
	Pressione di lavoro	0-0,8 bar
	Tempo di lavoro prestabilito	15 minuti
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V—240 V
	Frequenza	50 Hz/60 Hz
	Potenza nominale	20 W



Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta la informazione tecnica e commerciale di cui potresti aver bisogno. Fotografie, dossiers, schede tecniche, ecc. Non te lo perdere.

Dossiers | Technical Zoom



Accendi WEELKO TV da weelko.com. Il miglior modo di usare le nostre apparecchiature. Per coloro che preferiscono un'immagine a mille parole!



weelko.com

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta,92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 90 20
E. info@weelko.com