




weelko

Welcome to  weelko



HighTech Air WKB001

Pressotherapie

HighTech Air WKB001


Pressotherapie

Hinweis: Der Bildschirm ist mit einem sehr dünnen selbstklebenden Aufkleber geschützt, der ihn vor möglichen Kratzern in der Verpackung schützt. Er kann nach dem Auspacken entfernt werden.

INHALT

- Rechter und linker Fuß.
- Rechte und linke Beine.
- Hüfte.
- Rechter und linker Arm.
- Kabel und Schläuche für Decke.
- Haupteinheit.



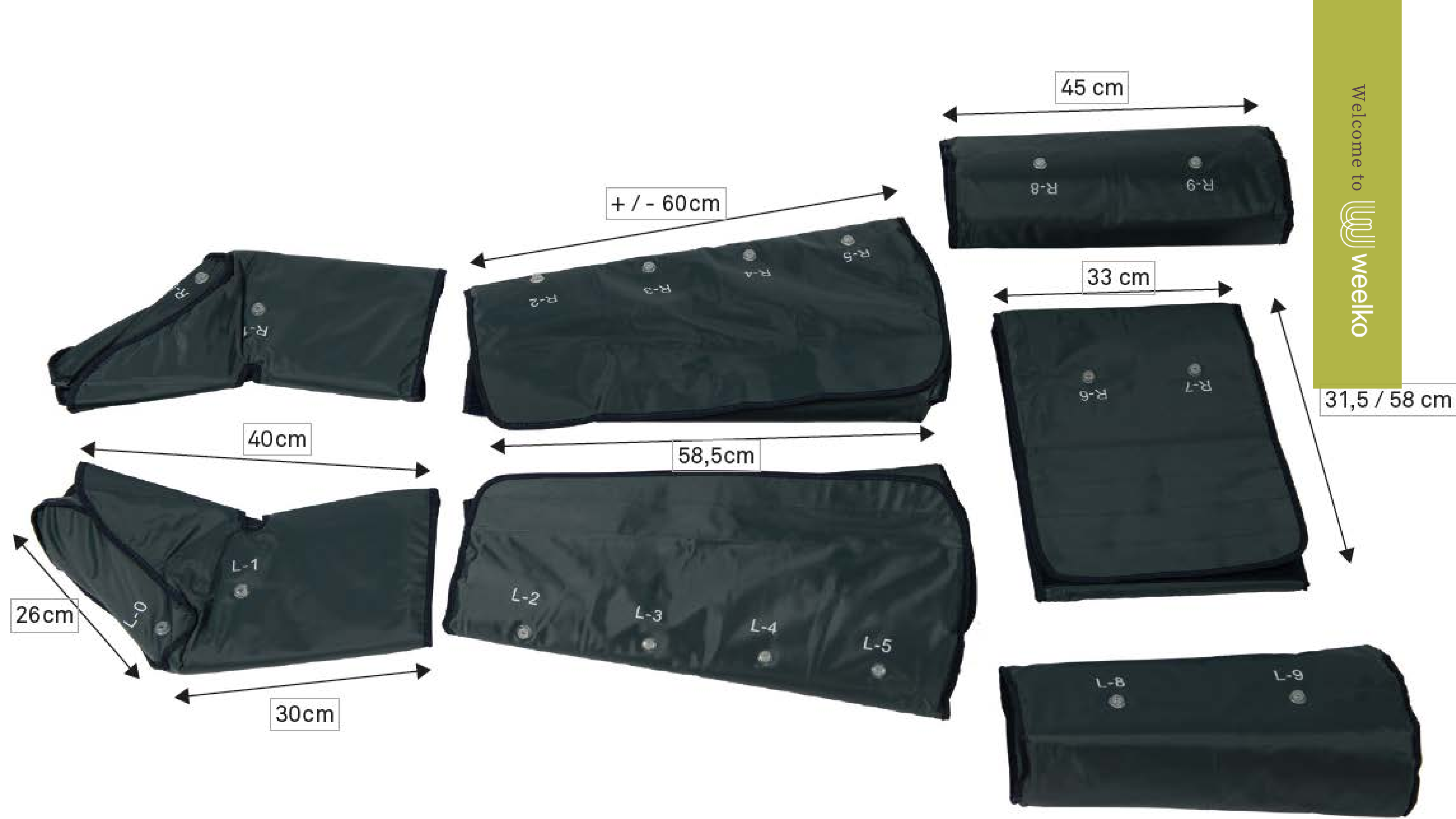

Unser WKB001 ist ein digitales Pressotherapiegerät mit Touchscreen. Anzug bestehend aus Stiefeln, Beinen, Bauchgürtel und Armen. Darüber hinaus enthält es eine Decke zur Aufbewahrung der Kabel. Es ist ideal, um die Durchblutung zu verbessern, die Beseitigung von Fett durch Aktivierung der Lymphdrainage sowie die Sauerstoffversorgung der Zellen und die Muskelentspannung zu erleichtern. Es wird unser Hauptverbündeter bei Körperbehandlungen sein.

digitales



HighTech Air WKB001

Pressotherapie

HighTech Air

WKB001

Pressotherapie

Um das Gerät richtig anzuschließen, muss dies auf der Rückseite erfolgen. Es geschieht von links nach rechts wie folgt:

- Das Kabel auf der Rückseite einstecken (200-240V 50Hz).
- Die Schläuche richtig auf der Rückseite einstecken. Die Zahlenanweisungen folgen, es sind 3 Anschlüsse.
- Die Decke auf eine flache Fläche legen, damit sich der Patient hinlegen kann. Die Decke mit Einwegpapier schützen, um die geeigneten Hygienebedingungen zu gewährleisten.
- Wickeln Sie die Teile des Anzuges um den Körper des Patienten herum. Denken Sie daran, einen Einweganzug unter dem Pressotherapie Anzug zu verwenden und nach dem Gebrauch es zu desinfizieren.

Die Pressotherapie

Es ist eine nicht-invasive, nicht schmerzhaft Technik, die bei ästhetischen Behandlungen hilft, bei denen das Lymph- und Kreislaufsystem stimuliert werden soll, und somit eine hervorragende Ergänzung im Studio darstellt. Das Kompressionssystem wurde entwickelt, um den venösen und lymphatischen Fluss zu erhöhen und den venösen Rückfluss zu verbessern. Es hilft uns, die natürlichen Giftpureinigungsfunktionen des Körpers zu fördern. Revitalisierung und Sauerstoffanreicherung sind zweifellos eine Folge der Behandlung mit unserem Gerät, die es schafft, Gewicht zu verlieren und Beine, Taille und Arme neu zu definieren und gleichzeitig den Hautton zu verbessern. Die Anzahl der Sitzungen kann zwischen 2 und 3 pro Woche liegen und hängt von der Art der Behandlung und den zu erzielenden Ergebnissen ab. Daher ist die vorherige Bewertung des Kunden sehr wichtig. Dies ist eine sichere, entspannende und angenehme Behandlung.



Die Taste auf der Frontplatte drücken, um das Gerät einzuschalten und auf dem Weelko Logo des Bildschirms klicken, um die gewünschten Menüs auszuwählen. Wählen Sie die Funktion “Pressotherapy” aus, um anfangen zu arbeiten.

Als erstes soll man die Behandlung auswählen:

Pressotherapy: für Pressotherapie.

Mode: Bei der Pressotherapie Funktion ermöglicht das Menü "MODE", ein von den vier Programmen auszuwählen: A,B,C,D.

Level: Die Druckintensität der Behandlung wird in drei Stufen reguliert: niedrig, mittel, hoch. Wir werden immer auf die Toleranz des Kunden achten, anfangen von weniger bis mehr, um Verletzungen zu vermeiden, und prüfen, ob die Intensität während der gesamten Behandlung angemessen ist.


Time: Diese Funktion bestimmt die Behandlungszeit von 30-45 Minuten, max. empfohlen.

Play und Pause: um mit der Behandlung anzufangen oder die Behandlung zu stoppen.



Welcome to


weelko

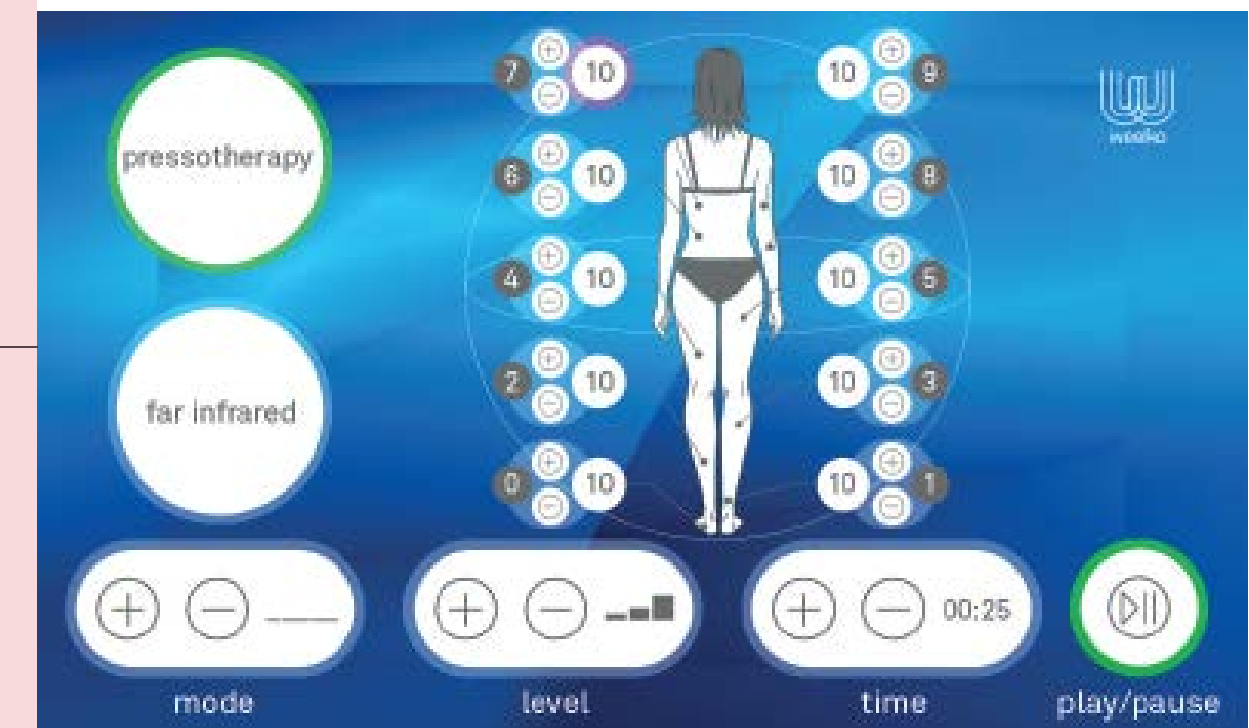


4 Programme sind enthalten:

Das Programm A bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Es bläst die Luft heraus von Kammer 0 wenn die 1 aufgeblast wird und bläst die Luft heraus von Kammer 1 wenn die 2 aufgeblast wird, und so weiter von Gliedmaßen zu Gliedmaßen, schrittweise steigend von den Füßen zu den Armen, mit einer Füllzeit pro Zone von 11 Sekunden und eine Ruhezeit von 11 Sekunden . Dies sorgt für ein angenehmes Gefühl einer weichen Drainage. Am Ende wird es von 0 bis 9 gleichzeitig aufgeblast und das Programm wird wiederholt.

Das Programm B bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Es bläst die Luft heraus von Kammer 0 wenn die 2 aufgeblast wird und bläst die Luft heraus von Kammer 1 wenn die 3 aufgeblast wird, und so weiter von einer Seite zu der anderen mit einer Füllzeit pro Zone von 11 Sekunden, danach steigt der Druck im ganzen Körper. Am Ende wird es von 0 bis 9 gleichzeitig aufgeblast und das Programm wird wiederholt. Das Druckgefühl ist etwas intensiver und tiefer und wird im Allgemeinen zur Behandlung von ödematöser Cellulite, Fett- oder Flüssigkeitsretention und Ödemen verwendet.

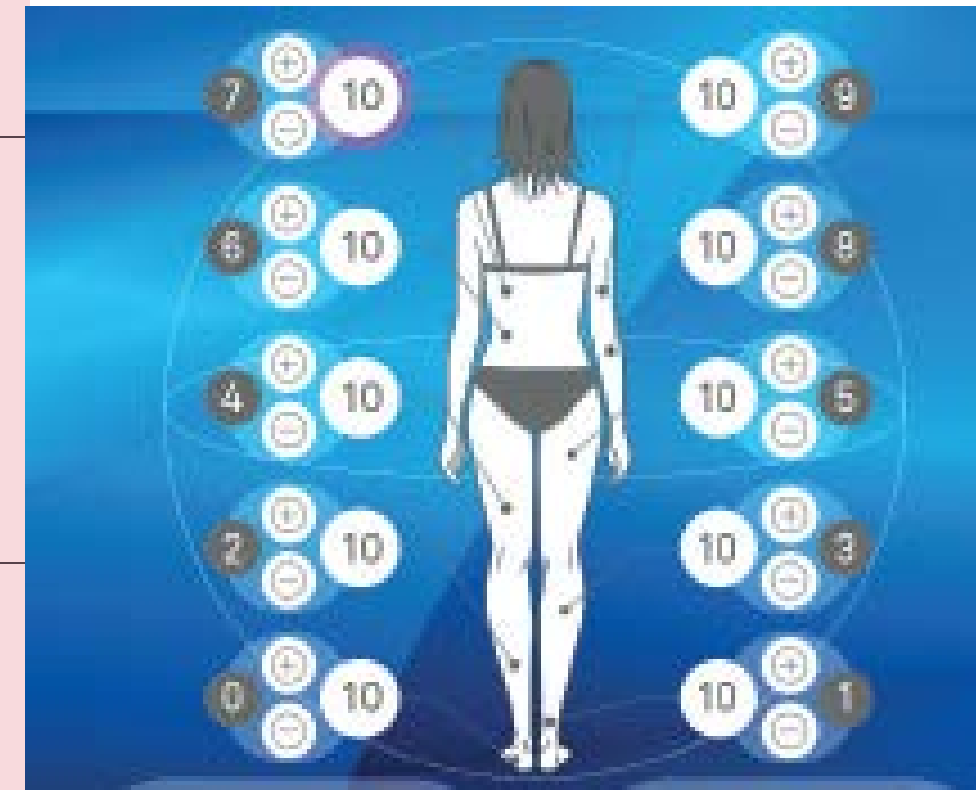

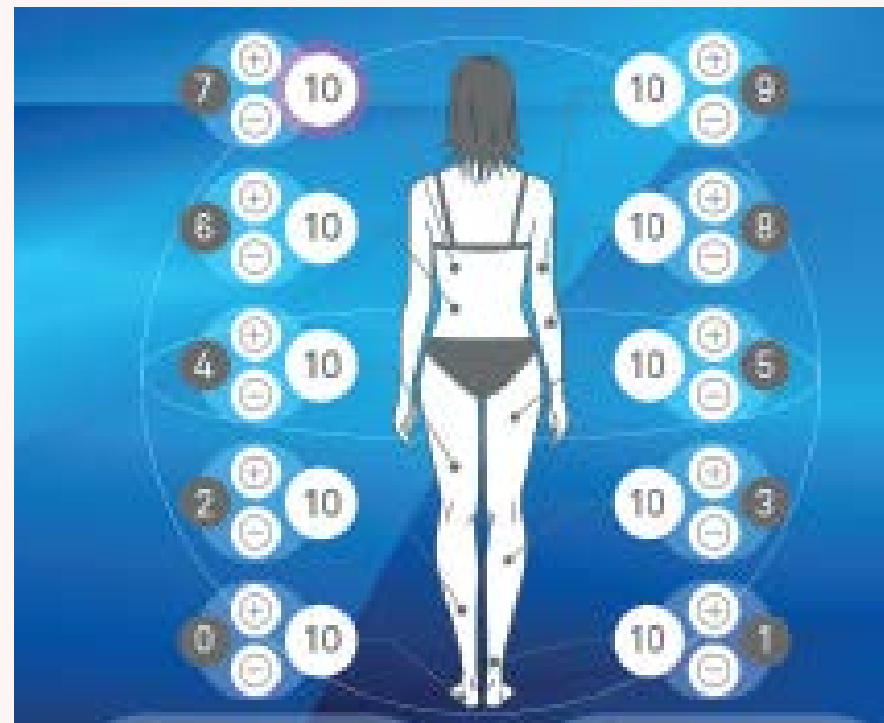


Das Programm C bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Als erstes wird die Kammer 0 aufgebläst und die Kammer 1 kommt dazu und so werden die anderen Kammer weiter dazu addiert. Der Luftdruck geht nicht gleichzeitig wie in den vorherigen Programmen verloren. Es gibt eine Ruhezeit von 11 Sekunden und am Ende wiederholt sich das Programm. Es übt einen viel stärkeren Druck aus, der sich auf Bauch und Oberschenkel konzentriert. Es wird für Patienten mit Cellulite oder dickerem lokalisiertem Fett an Oberschenkeln und Bauch empfohlen.

Das Programm D bläst die drei Kammer gleichzeitig: Beine, Bauch und Arme vom unteren bis zum oberen Teil. Es ist ein viel intensiveres Programm, welches sich auf Bauch und Arme konzentriert. Empfohlen für Bauchschwere und Flüssigkeitsretention auf Armhöhe.

Wenn Sie mit unabhängigen Bereichen ohne Programm arbeiten möchten, ermöglicht das Gerät jedes Teil des Anzuges auszuwählen und die Intensität der Luftfüllung unabhängig zu regulieren. Drücken Sie einfach auf die Taste des Bereiches und die Intensität davon wird mit den Tasten „+“ und „-“, von 0 bis 15 reguliert.


Behandlungsmodus

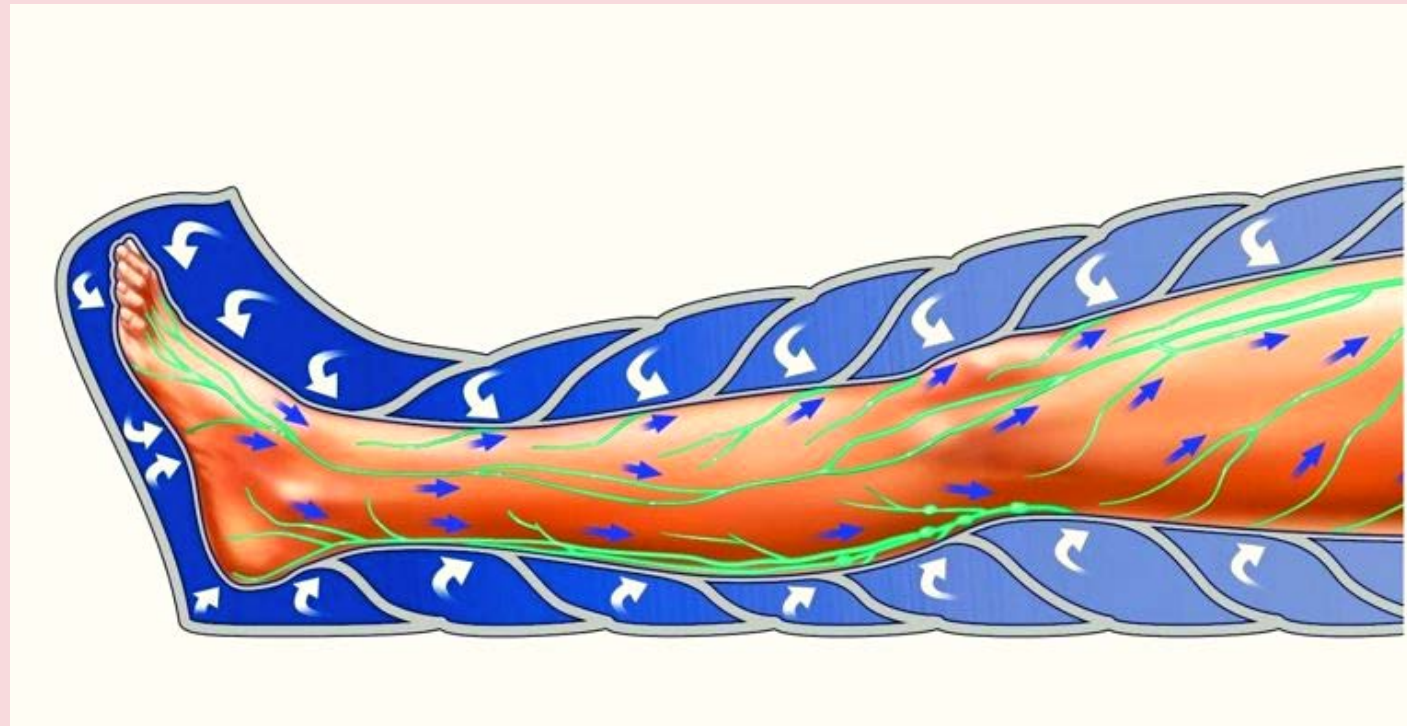

Die Anwendung von Luftdruck, der die venöse Rückführung von Blut zum Herzen stimuliert, führt zu einer erhöhten Durchblutung und Lymphzirkulation sowie zu einer entspannenden und thermischen Wirkung, die vom Gerät erzeugt wird. Der Kunde muss auf der Liege auf dem Rücken liegen, und die verschiedenen Vorrichtungen werden platziert und die Bereiche abgedeckt, egal ob es sich um Füße, Beine, Taille oder Arme handelt. Dadurch wird gemäß dem ausgewählten Protokoll der kontrollierte Luftdruck auf die zu behandelnden Körperteile nach oben verteilt.

Fragen Sie den Kunden während der Behandlung immer wieder nach, ob Temperatur, Druck und Zeit passt.

Anwendungsform

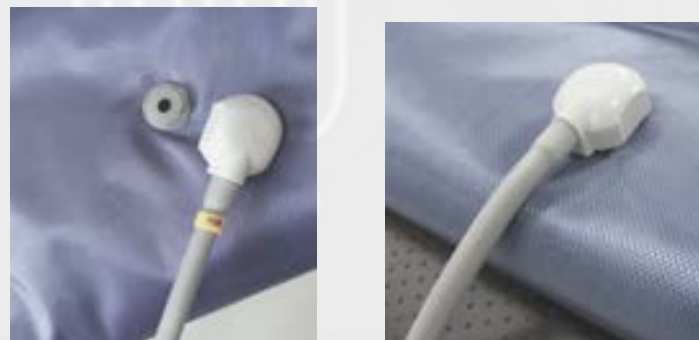

- Schließen Sie die Schläuche auf der Rückseite richtig an. Beachten Sie unbedingt die numerischen Angaben. Die dicken Kabel von 0 bis 9 sind für die Pressotherapie.
- Es ist wichtig, die Decke mit den Kabeln auf eine ebene Fläche zu legen, damit sich der Patient hinlegen kann.
- Schützen Sie die Decke mit einem Einwegpapier, um die richtigen Hygienebedingungen zu gewährleisten.
- Wickeln Sie die Teile des Anzuges um den Körper des Kunden und passen Sie sie an. Denken Sie daran, einen Einweganzug unter dem Pressotherapie-Anzug zu tragen. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie **Pressotherapie** aus die Intensität.
- Der Druck des Gerätes beträgt 20-40KPa, 25-40L/m.

Hinweise



- Behandlung von Flüssigkeitsretention, Ödemen und Lymphödemen.
- Behandlung der Beseitigung von Fetten und Toxinen.
- Müde Beine Behandlung.
- Hilfe bei Behandlungen zur Reduzierung von lokalisiertem Fett.
- Behandlungen zur Verbesserung der Durchblutung bei Patienten mit Bluthochdruck und Diabetes.
- Verbessert das Erscheinungsbild von Orangenhaut.
- Behandlung und Vorbeugung von Krampfadern.
- Kreislaufstimulation.
- Wiederherstellung des postoperativen Lymphkreislaufs.
- Muskelaufbau
- Sauerstoffversorgung des Körpers.

Gegenanzeige

Da es sich um eine sehr kontrollierte Behandlung handelt, gibt es nur wenige Gegenanzeige. Es ist jedoch wichtig, vor der Durchführung sich von einem medizinischästhetischen Profi beraten zu lassen.

- Schwere kardiovaskuläre Probleme.
- Phlebitis.
- Infektionskrankheiten.
- Hautkrankheiten und mögliche aktive Infektionen.
- Immundefekte Krankheiten oder Krebspatienten.
- Hormonelle Probleme.
- Bei schwangeren Frauen können nur Beine und Arme bei sehr niedrigem Luftdruck und immer auf ärztliche Verordnung behandelt werden.
- Es darf nicht bei Menschen mit Epilepsie, Herzschrittmachern oder anderen schwerwiegenden psychischen oder medizinischen Erkrankungen angewendet werden.
- Es wird nicht empfohlen, es bei Menschen mit klaustrophobischen Problemen zu verwenden.

Achtung

- Es ist wichtig, den Anzug nicht zu fest am Körper des Kunden zu befestigen, um ihn nicht zu verletzen, wenn der Luftdruck sehr stark ist. Die Druckregelung wird immer innerhalb der Toleranz des Kunden liegen.
- Wenn der Anzug zerrissen oder gealtert ist, ersetzen Sie ihn bitte durch einen neuen.
- Fragen Sie während der gesamten Behandlung beim Kunden nach, ob der Luftdruck angemessen ist.
- Es wird empfohlen, dass der Kunde viel Wasser vor und nach der Behandlung trinkt.
- Verwenden Sie einen Celluloseschutz unter dem Pressotherapie-Anzug, um die richtigen hygienischen Bedingungen zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine Flüssigkeit auf dem Gerät.
- Lassen Sie das Gerät nur von Profis montieren und demontieren.
- Überprüfen Sie im Falle einer Gerätefehlfunktion sorgfältig alle Verbindungen und wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen technischen Service.

Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com

