



weelko  
the wellness  
company

**LA MICRODERMOABRASIÓN  
MEDIANTE PUNTAS DE DIAMANTE  
FORMACIÓN&ESTÉTICA  
WEELKO**

## 0. ÍNDICE

1. ¿QUÉ ES LA MICRODERMOABRASIÓN?
2. ¿PARA QUÉ SIRVE?
3. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
4. RESULTADOS
5. PRECAUCIONES
6. COMBINACIÓN CON OTROS TRATAMIENTOS
7. PUNTAS DE DIAMANTE
8. EQUIPOS MICRODERMOABRASIÓN WEELKO

## 1. ¿QUÉ ES LA MICRODERMOABRASIÓN?

La microdermoabrasión mediante puntas de diamante es un tratamiento estético no invasivo de exfoliación mecánica de la piel controlado, preciso y progresivo.

Actúa sobre las capas superficiales de la piel con la ventaja de que no requiere productos químicos.

Se trata de un método eficaz para tratar imperfecciones superficiales de la piel, principalmente localizadas en el rostro, aunque también puede utilizarse en zonas corporales como manos, pies o espalda.

El mecanismo de exfoliación utilizado es sencillo: Se aplican las puntas de diamante en forma de micro cristales que desgastan la superficie de la piel, mientras absorben los residuos. Así, se remueven las células muertas de la superficie de la piel, y se acelera la consecuente regeneración celular que, de forma natural, se acostumbra a producir cada 21 días aproximadamente. Además, este proceso ayuda a favorecer la producción de colágeno y elastina, promoviendo así la recuperación y el desarrollo de una piel más saludable y de apariencia juvenil. También facilita la eliminación de cicatrices y arrugas.

Uno de los componentes más importantes del equipo es la punta diamantada que está en contacto con la piel. Las puntas deben tener un diseño adecuado para las distintas aplicaciones. Se busca el mejor resultado teniendo en cuenta la granulación y la forma redondeada.

Otro factor importante es la succión neumática que se realiza en el mango portapuntas. La succión o efecto vacío se utiliza para eliminar células y tejidos de desecho, y también para ciertos tratamientos donde se desea que el contacto piel-diamante sea el más alto posible.

Una vez finalizada la sesión es muy importante hidratar la piel. Se recomienda aplicar una hidratante con protección solar para prevenir el daño de los rayos solares sobre la delicada piel. Es posible que se sienta algo de sequedad en la piel, por lo que el uso de hidratante es importante.

## 2. ¿PARA QUÉ SIRVE?

- Para mejorar la apariencia de la piel y en general para revitalizarla.
- Foto envejecimiento (reducción de manchas, pieles envejecidas por efecto de la exposición al sol).
- Prepara la piel para la aplicación de activos tópicos, nutrientes y regeneradores.
- Líneas de expresión ligeras (arrugas finas y medianas).
- Cicatrices de acné.
- Estrías.
- Espinillas.
- Piel flácida.
- Reducción de poros abiertos.

## 3. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Una sesión de microdermoabrasión suele durar entre 20 y 30 minutos, aproximadamente.

Se aconseja que la frecuencia de aplicación sea de una vez por semana o cada 15 días, hasta un total de 3 a 10 sesiones, según los resultados que se deseen obtener. Se puede llevar a cabo en cualquier momento del año.

Tratamiento	Frecuencia (días)	Total visitas
Peeling facial	6-10	3-5
Líneas de expresión	7-13	6-8
Cuello	12-14	3-5
Cicatrices de acné	7-12	8-10
Hiperpigmentación	7-12	8-10

Posteriormente, es aconsejable realizar sesiones mensuales o bimestrales de mantenimiento.

## 4. RESULTADOS

Los resultados de la microdermoabrasión con puntas de diamante se aprecian desde la primera sesión. Los más evidentes son la suavidad y luminosidad de la piel, que se ve radiante y juvenil, limpia y saludable.

Suelen ser necesarias al menos 5 sesiones para tener un efecto duradero y apreciar los resultados en los problemas específicos que originaron el tratamiento.

## 5. PRECAUCIONES

- Evitar su utilización en áreas cutáneas irritadas.
- No efectuar succión en la zona de párpados. Los ojos deben estar cerrados durante todo el tratamiento. Se recomienda taparlos con algodones húmedos.
- No aplicar el tratamiento en los siguientes casos: tumor de piel, lunares, marcas de nacimiento, angiomas, labios, ojos, herpes y verrugas.
- No aplicar más de 10 sesiones al año, la piel necesita descansar.
- Entre sesiones tratar la zona con cosmética regenerante e hidratante.
- No exponer la zona al sol durante 72-96 horas posteriores a la sesión y aplicar cremas protectoras con alto factor de protección.

## 6. COMBINACIÓN CON OTROS TRATAMIENTOS

La microdermoabrasión es una terapia fundamental a la hora de combinar diferentes tratamientos:

Radiofrecuencia.	Cepillo rotatorio.	Mesoterapia virtual.
Martillo frío y calor.	Electroporación.	
Peeling ultrasónico.	Mesoterapia.	

## 7. PUNTAS DE DIAMANTE

Este equipo dispone de 9 cabezales de diferentes grosores: D-100, D-180, D-200, D-220 y D-250.

Si el dígito es menor significa que será el que se debe utilizar para exfoliaciones más profundas. Si el dígito es mayor, o que el grano es más delgado, se utiliza para exfoliaciones más suaves.

<b>Diámetro 22 MM</b>	
D100	Corporal. Indicado para acné, rodillas, codos y áreas con estrías.
D180	
<b>Diámetro 19 MM</b>	
D180	Rostro. Indicado para manchas grandes, poros, envejecimiento por exposición solar.
D220	
<b>Diámetro 15 MM</b>	
D100	Cicatrices, líneas finas y diversas imperfecciones.
D200	
D250	
<b>Diámetro 8 y 6 MM</b>	
D200	Ojos y ambos lados de la nariz. Arrugas, acné, espinillas y puntos negros.
D250	

## 8. EQUIPOS MICRODERMOABRASIÓ WHEELKO

### U-Tech (Ref. F-834)

Microdermoabrasión con puntas de diamante.



### B-Equipment (Ref. F-319A)

Microdermoabrasión con puntas de diamante.



Combinable con torre multifuncional **B-System** (Ref. 3021).

## MultiEquipment (Ref. F-332)

Microdermoabrasión con puntas de diamante  
Martillo frío/calor  
Peeling ultrasónico  
Ultrasonidos



Combinable con torres multifuncionales **Kpsule** (Ref. 3051) y **Multilab** (Ref. 3050D).

## MultiEquipment (Ref. F-334)

Microdermoabrasión con puntas de diamante  
Peeling ultrasónico



Combinable con torres multifuncionales **Kpsule** (Ref. 3051) y **Multilab** (Ref. 3050D).

## MultiEquipment (Ref. F-336)

Microdermoabrasión con puntas de diamante  
Microdermoabrasión con micro cristales de óxido de aluminio



Combinable con torres multifuncionales **Kpsule** (Ref. 3051) y **Multilab** (Ref. 3050).

## MultiEquipment (Ref. F-336B)

Microdermoabrasión con puntas de diamante



Combinable con torres multifuncionales **Kpsule** (Ref. 3051) y **Multilab** (Ref. 3050D).

## Torres multifuncionales



---

**B-System (Ref. 3021)**



**Kpsule (Ref. 3051)**



**Multilab (Ref. 3050D)**



**La microdermabrasión mediante puntas de diamante**

Información dirigida a profesionales de la estética,  
facilitada por Weelko con la colaboración  
de Etern Wellness.

Formación&Estética  
[weelko.com](http://weelko.com)